


モニター：
スタートガイド

G7

G7 の基本 | G7 は、表示デバイスにグルコース情報を表示します。

センサー および アプリケーター

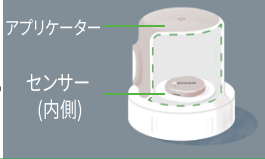

- セットアップ中に、アプリケーターを使用してセンサーを皮下に装着する方法を説明します。
- センサーは 5 分ごとにグルコース測定値をモニターまたは他の表示デバイスに送信します。
- センサーは最長 10 日間持続し、12 時間の猶予期間があります。

オーバーパッチ



センサーを装着した後、オーバーパッチを使用してセンサーを肌に密着させることができます。

モニターのセットアップ

1. センサーの装着

- モニターとペアリングする前にセンサーを装着する必要があります。
- 手順については、センサーの箱にある「センサーの装着」を参照してください。

スタートガイド

1 G7 の基本

G7 は、表示デバイスにグルコース情報を表示します。

2. モニターをセットアップする

- **選択ボタン**を3～5秒間押して、モニターの電源をオンにします。(モニターのナビゲーションに移動します。)
- モニターの手順に従ってモニターをセットアップします。ペアリングする前にセンサーを装着してください。
- センサーを装着してペアリングした後、地域のガイドラインに従ってアプリケーションを廃棄してください。

3. センサーのウォームアップ

- センサーウォームアップタイマーは、測定値とアラートの受信を開始する時間を通知します。



4. センサー測定期間

- 詳細については、「モニターの使用」およびオンラインの「G7 ユーザーガイド」dexcom.com/ja-JP/downloadsandguides/searchを参照してください。

モニターのナビゲーション


モニターの画面には、使用するボタンが表示されます。

- スクロールを速くするには、**スクロール**ボタンを長押しします。
- 次のフィールドに移動するには、**選択**ボタンを使用します。



最大 3 台の表示デバイスを使用可能

スマートフォン、スマートウォッチ、および Dexcom モニターでグルコース情報を受信します。スマートフォンアプリ、モニター、またはその両方を順序を問わず設定できます。サポートされているスマートデバイスとオペレーティングシステムについては、dexcom.com/ja-jp/compatibility を参照してください。

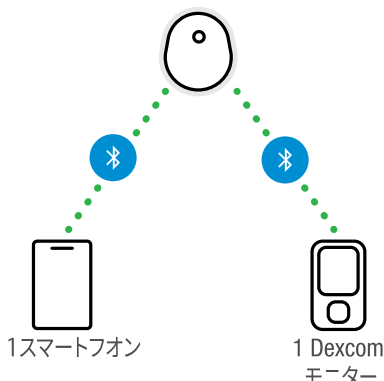

センサーの箱にある「安全上の注意」と「モニターの使用方法」を確認してください。詳しい手順については、dexcom.com/ja-JP/downloadsandguides/search で「G7 ユーザーガイド」を参照してください。

すべてのグラフィックは代表的なものです。実際の製品は異なる場合があります。



© 2025 Dexcom, Inc. 無断転載を禁じます。

Dexcom および関連するロゴ、デザインマークは、米国およびその他の国における Dexcom, Inc. の登録商標または商標です。他のすべてのマークはそれぞれの所有者の財産です。

dexcom G7



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1-858-200-0200
dexcom.com

本 品 お よ び サ イ バ ー
セ キ ュ リ テ ィ ー に 関 す る
問 い 合 わ せ 窓 口 :
Dexcomテクニカルサポート
0800-000-8019

高度管理医療機器
特定保守管理医療機器
一般的名称: グルコースモニタシステム
販売名: Dexcom G7 CGM システム
承認番号: 30500BZI00035000

  203-JN1347

  203-JN1346

選任製造販売業者:
DexCom Japan 合同会社
東京都目黒区下目黒一丁目8番1号
アルコタワー7階