

2025 年 6 月

選任製造販売業者：デクスコムジャパン合同会社
〒153-0064 東京都目黒区下目黒一丁目 8 番 1 号
アルコタワー 7 階

【Dexcom G7 CGM システム】 G7 モニターの自主回収およびスピーカーテストのお願い
(スマートフォンの G7 アプリ使用の方は対象外です。)

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

弊社が製造販売する「Dexcom G7 CGM システム」のモニター（以降、G7 モニター）について、市場からの報告事例について調査を行ったところ、下記の事象があることが確認されました。

そのため、自主回収を実施いたしますが、交換用の良品の準備が整うまでの間の対応として、下記をご案内申し上げます。

● スピーカーの故障によりアラート/アラームの音が鳴らない場合がある

影響があるのは音声アラート/アラーム機能のみです。

(センサー測定値とトレンドグラフはモニター上に継続して表示され、測定値の精度に関しては影響ありません。また、バイブレーション機能も影響ありません。)

対象製品

製品番号	製品コード	製品名	対象シリアル
MT26403-4	STK-GT-019	「Dexcom G7 CGM システム」 モニター	2024 年 11 月 18 日～2025 年 5 月 30 日 に弊社から出荷した特定のシリアル 計 6,268 台 (シリアル番号一覧は弊社ホームページ および PMDA の医療機器関連情報－ 回収情報(医療機器)の Web ページに 掲載しております。)

(特定シリアルの G7 モニターが対象です。3 ページ目の図および確認方法をご参照ください)

※なお、G7 モニターを使用しておらず、スマートフォンのアプリのみを使用されている方は、
当該事象の影響はありません。

また、回収対象シリアルの G7 モニターでも、下記記載のスピーカーのテストに問題が無ければ、
お手元の G7 モニターは当面の間、引き続きご利用いただけます。

交換用の良品が準備でき次第、改めてご案内申し上げます。

当該事象の詳細

G7 モニターを使用している一部のユーザーから下記の事例が報告されました。

- アラート/アラームの音が鳴らない

市場からの苦情返却現品の追加調査の結果、一部のスピーカー部品において不具合がある事が分かりました。一部のスピーカーでスピーカーの構成部品（ウレタンフォームの補強材）に問題があり、使用されているウレタンフォームが時間経過に伴い反発力が低下し、スピーカーと電子基板との接触不良を生じる可能性があることが判りました。そのため、G7 モニターでアラート/アラームの音が鳴らなくなることが判明しました。一方で、この事象は、音声出力が出ないよう設定をしていた、ボリュームが小さかった等、G7 モニターの設定による原因も考えられます。

ただ、この場合であっても、センサー測定値とトレンドグラフはモニター上に継続して表示され、測定値の精度に関しては影響ありません。また、バイブレーション機能も影響ありません。

アラート/アラームの音が鳴らない場合、重度の低血糖/高血糖の検出、治療が遅れる可能性があります。G7 モニターは全世界で 2025 年 5 月までにおよそ 250 万個以上の出荷実績がありますが、そのうちアラート/アラームの音が鳴らない事象の報告は全世界合計で 2861 件報告を受けています。調査のために返却品を受領した 456 個のうち、電子基板とスピーカーの接触不良が確認されたのは 112 個で、残りの 344 個についてはスピーカーの問題は認められませんでした。なお、アラート/アラームの音が鳴らない報告のうち、56 件については低血糖/高血糖事象（発作、意識喪失、嘔吐、または特定できない低血糖/高血糖症状）が発生しましたが、いずれも治療後に回復したと報告されています。なお、本邦においては重篤な健康被害の報告はありません。

電子添文の記載

<使用方法等に関連する使用上の注意>として下記を記載しております。

表示デバイスのスピーカーと振動を定期的に点検すること。

モニターのスピーカーと振動の動作確認をするには、モニターの充電を開始し、スピーカーテスト画面が数秒間表示されたら、画面の指示に従い点検を行う。ビープ音や振動が鳴らない場合は、Dexcom テクニカルサポートに連絡して、モニターが修理されるまでアプリ又は血糖自己測定器を使用すること。

スピーカーと振動の確認のため、下記の手順を実施ください。

スピーカーと振動の確認手順

アラート/アラームの音が鳴らない当該事象の確認のため、下記の方法をご案内いたします。

- 下記メニューからスピーカーのテストを実施してください。

メニュー > 情報 > モニター > スピーカーのテスト > スピーカーのテスト開始



- G7 モニターを充電する際に、スピーカーのテストが表示されますので、その際もスピーカーのテストを実施してください。

- スピーカーのテストが成功しない場合は、Dexcom テクニカルサポートに連絡してトラブルシューティングを行い、モニターの交換が必要かどうかを確認してください。トラブルシューティングの結果、必要に応じて交換対応を行います。モニターの問題が解決するまでは、スマートフォンアプリ、スマートウォッチアプリ、血糖値測定器などの代替ディスプレイデバイスをご利用ください。

回収対象となる G7 モニターの確認手順

下記のリンク、または右記の QR コードにアクセスして、G7 モニターのシリアル番号を入力いただくことで、お使いの G7 モニターが回収対象かどうか判別することができます。

<https://cdn.c1.amplience.net/c/dexcom/ja-jp-receiver-lookup>



シリアル番号は外箱のラベルに記載の他、G7 モニター本体背面に記載があります。

また、**メニュー > 情報 > モニター > 詳細 > モニターの詳細ページ** からご確認いただけます。



対象製品の図（シリアル番号記載箇所）



なお、シリアル番号一覧は弊社ホームページおよび PMDA の医療機器関連情報－回収情報（医療機器）の Web ページに掲載しております。

本件に関するお問い合わせ先

Dexcom G7 モニターお問合せセンター

電話番号： 0800-000-3012（通話料無料）

営業時間： 月曜 - 金曜 9:00-18:00（土・日・祝日および弊社指定休業日を除く）

電話がつながりにくい場合もございますので、

下記 URL もしくは右記 QR コードからアクセスいただき、

情報を入力いただけましたら、こちらから折り返しご連絡いたします。

ご不便をお掛け致しますが、何卒、ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

<https://www.dexcom.com/ja-jp/dexcom-g7-monitor-inquiry>



この度は、皆様にご心配、ご不便をお掛けし、衷心よりお詫び申し上げます。

回収交換用の良品の準備が整い次第、改めてご案内申し上げます。

今後もより一層品質及び安全性の向上に努めて参りますので、ご理解、ご高配を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

【Dexcom G7 CGM システム】 G7 モニターの自主回収およびスピーカーテストのお願い

別紙 対象シリアル番号一覧

対象となる製品： Dexcom G7 CGM システム モニター
出荷時期： 2024 年 11 月 18 日～2025 年 5 月 30 日
出荷数量： 6,268 台

製造記号：

PG423G07FE00003604	PG423G07FE00004266	PG423G07FE00004277	PG423G07FE00012165
PG423G07FE00012191	PG423G07FE00012211	PG423G07FE00012218	PG423G07FE00012221
PG423G07FE00012222	PG423G07FE00012230	PG423G07FE00012232	PG423G07FE00012234
PG423G07FE00012235	PG423G07FE00012337	PG423G07FE00012387	PG423G07FE00012390
PG423G07FE00012391	PG423G07FE00012393	PG423G07FE00012394	PG423G07FE00012397
PG423G07FE00012399	PG423G07FE00012400	PG423G07FE00012401	PG423G07FE00012403
PG423G07FE00012409	PG423G07FE00012497	PG423G07FE00012498	PG423G07FE00012502
PG423G07FE00012506	PG423G07FE00012508	PG423G07FE00012510	PG423G07FE00012511
PG423G07FE00012513	PG423G07FE00012514	PG423G07FE00012517	PG423G07FE00012521
PG423G07FE00012528	PG423G07FE00012535	PG423G07FE00012546	PG423G07FE00012549
PG423G07FE00012554	PG423G07FE00012557	PG423G07FE00012562	PG423G07FE00012564
PG423G07FE00012567	PG423G07FE00012574	PG423G07FE00012576	PG423G07FE00012577
PG423G07FE00012578	PG423G07FE00012580	PG423G07FE00012581	PG423G07FE00012586
PG423G07FE00012599	PG423G07FE00012601	PG423G07FE00012606	PG423G07FE00012614
PG423G07FE00012615	PG423G07FE00012618	PG423G07FE00012631	PG423G07FE00012635
PG423G07FE00012641	PG423G07FE00012643	PG423G07FE00012644	PG423G07FE00012646
PG423G07FE00012647	PG423G07FE00012653	PG423G07FE00012656	PG423G07FE00012664
PG423G07FE00012668	PG423G07FE00012671	PG423G07FE00012686	PG423G07FE00012694
PG423G07FE00012698	PG423G07FE00012701	PG423G07FE00012705	PG423G07FE00012706
PG423G07FE00012708	PG423G07FE00012710	PG423G07FE00012712	PG423G07FE00012715
PG423G07FE00012717	PG423G07FE00012721	PG423G07FE00012723	PG423G07FE00012727
PG423G07FE00012728	PG423G07FE00012729	PG423G07FE00012747	PG423G07FE00012752
PG423G07FE00012755	PG423G07FE00012757	PG423G07FE00012766	PG423G07FE00012768
PG423G07FE00012769	PG423G07FE00012772	PG423G07FE00012775	PG423G07FE00012776
PG423G07FE00012777	PG423G07FE00012779	PG423G07FE00012783	PG423G07FE00012786
PG423G07FE00012790	PG423G07FE00012791	PG423G07FE00012793	PG423G07FE00012798
PG423G07FE00012800	PG423G07FE00012801	PG423G07FE00012802	PG423G07FE00012803

PG423G07FE00012805	PG423G07FE00012809	PG423G07FE00012811	PG423G07FE00012814
PG424G07FE00000131	PG424G07FE00000137	PG424G07FE00000138	PG424G07FE00000139
PG424G07FE00000140	PG424G07FE00000142	PG424G07FE00000143	PG424G07FE00000145
PG424G07FE00000148	PG424G07FE00000150	PG424G07FE00000152	PG424G07FE00000153
PG424G07FE00000154	PG424G07FE00000155	PG424G07FE00000156	PG424G07FE00000158
PG424G07FE00000159	PG424G07FE00000161	PG424G07FE00000162	PG424G07FE00000163
PG424G07FE00000165	PG424G07FE00000166	PG424G07FE00000167	PG424G07FE00000168
PG424G07FE00000169	PG424G07FE00000170	PG424G07FE00000172	PG424G07FE00000173
PG424G07FE00000177	PG424G07FE00000179	PG424G07FE00000180	PG424G07FE00000181
PG424G07FE00000182	PG424G07FE00000183	PG424G07FE00000184	PG424G07FE00000187
PG424G07FE00000188	PG424G07FE00000189	PG424G07FE00000191	PG424G07FE00000192
PG424G07FE00000193	PG424G07FE00000195	PG424G07FE00000197	PG424G07FE00000198
PG424G07FE00000199	PG424G07FE00000200	PG424G07FE00000201	PG424G07FE00000202
PG424G07FE00000203	PG424G07FE00000204	PG424G07FE00000205	PG424G07FE00000206
PG424G07FE00000207	PG424G07FE00000208	PG424G07FE00000210	PG424G07FE00000211
PG424G07FE00000213	PG424G07FE00000214	PG424G07FE00000215	PG424G07FE00000216
PG424G07FE00000218	PG424G07FE00000220	PG424G07FE00000221	PG424G07FE00000223
PG424G07FE00000224	PG424G07FE00000225	PG424G07FE00000226	PG424G07FE00000228
PG424G07FE00000229	PG424G07FE00000231	PG424G07FE00000234	PG424G07FE00000235
PG424G07FE00000237	PG424G07FE00000238	PG424G07FE00000239	PG424G07FE00000240
PG424G07FE00000241	PG424G07FE00000242	PG424G07FE00000243	PG424G07FE00000244
PG424G07FE00000245	PG424G07FE00000247	PG424G07FE00000248	PG424G07FE00000249
PG424G07FE00000250	PG424G07FE00000254	PG424G07FE00000255	PG424G07FE00000256
PG424G07FE00000257	PG424G07FE00000258	PG424G07FE00000259	PG424G07FE00000260
PG424G07FE00000261	PG424G07FE00000263	PG424G07FE00000264	PG424G07FE00000265
PG424G07FE00000266	PG424G07FE00000267	PG424G07FE00000268	PG424G07FE00000269
PG424G07FE00000270	PG424G07FE00000271	PG424G07FE00000272	PG424G07FE00000276
PG424G07FE00000280	PG424G07FE00000281	PG424G07FE00000282	PG424G07FE00000287
PG424G07FE00000290	PG424G07FE00000292	PG424G07FE00000298	PG424G07FE00000299
PG424G07FE00000303	PG424G07FE00000310	PG424G07FE00000312	PG424G07FE00000314
PG424G07FE00000315	PG424G07FE00000317	PG424G07FE00000319	PG424G07FE00000320
PG424G07FE00000322	PG424G07FE00000324	PG424G07FE00000325	PG424G07FE00000326
PG424G07FE00000327	PG424G07FE00000331	PG424G07FE00000332	PG424G07FE00000334
PG424G07FE00000335	PG424G07FE00000337	PG424G07FE00000338	PG424G07FE00000339
PG424G07FE00000344	PG424G07FE00000350	PG424G07FE00000362	PG424G07FE00000372
PG424G07FE00000376	PG424G07FE00000377	PG424G07FE00000378	PG424G07FE00000379
PG424G07FE00000380	PG424G07FE00000382	PG424G07FE00000383	PG424G07FE00000385

PG424G07FE00000387	PG424G07FE00000390	PG424G07FE00000398	PG424G07FE00000399
PG424G07FE00000401	PG424G07FE00000403	PG424G07FE00000404	PG424G07FE00000406
PG424G07FE00000408	PG424G07FE00000410	PG424G07FE00000413	PG424G07FE00000414
PG424G07FE00000415	PG424G07FE00000416	PG424G07FE00000419	PG424G07FE00000421
PG424G07FE00000423	PG424G07FE00000425	PG424G07FE00000427	PG424G07FE00000430
PG424G07FE00000433	PG424G07FE00000435	PG424G07FE00000441	PG424G07FE00000443
PG424G07FE00000448	PG424G07FE00000449	PG424G07FE00000451	PG424G07FE00000452
PG424G07FE00000453	PG424G07FE00000454	PG424G07FE00000455	PG424G07FE00000456
PG424G07FE00000461	PG424G07FE00000463	PG424G07FE00000465	PG424G07FE00000467
PG424G07FE00000469	PG424G07FE00000471	PG424G07FE00000473	PG424G07FE00000474
PG424G07FE00000475	PG424G07FE00000476	PG424G07FE00000477	PG424G07FE00000478
PG424G07FE00000479	PG424G07FE00000480	PG424G07FE00000481	PG424G07FE00000483
PG424G07FE00000485	PG424G07FE00000488	PG424G07FE00000489	PG424G07FE00000491
PG424G07FE00000495	PG424G07FE00000498	PG424G07FE00000500	PG424G07FE00000501
PG424G07FE00000502	PG424G07FE00000503	PG424G07FE00000504	PG424G07FE00000505
PG424G07FE00000506	PG424G07FE00000508	PG424G07FE00000509	PG424G07FE00000510
PG424G07FE00000512	PG424G07FE00000514	PG424G07FE00000516	PG424G07FE00000518
PG424G07FE00000521	PG424G07FE00000527	PG424G07FE00000529	PG424G07FE00000530
PG424G07FE00000531	PG424G07FE00000533	PG424G07FE00000540	PG424G07FE00000552
PG424G07FE00000560	PG424G07FE00000563	PG424G07FE00000564	PG424G07FE00000566
PG424G07FE00000568	PG424G07FE00000572	PG424G07FE00000577	PG424G07FE00000586
PG424G07FE00000589	PG424G07FE00000590	PG424G07FE00000591	PG424G07FE00000593
PG424G07FE00000594	PG424G07FE00000595	PG424G07FE00000596	PG424G07FE00000598
PG424G07FE00000600	PG424G07FE00000602	PG424G07FE00000607	PG424G07FE00000608
PG424G07FE00000609	PG424G07FE00000612	PG424G07FE00000615	PG424G07FE00000628
PG424G07FE00000631	PG424G07FE00000633	PG424G07FE00000635	PG424G07FE00000636
PG424G07FE00000638	PG424G07FE00000640	PG424G07FE00000643	PG424G07FE00000646
PG424G07FE00000654	PG424G07FE00000656	PG424G07FE00000658	PG424G07FE00000661
PG424G07FE00000663	PG424G07FE00000665	PG424G07FE00000674	PG424G07FE00000675
PG424G07FE00000678	PG424G07FE00000679	PG424G07FE00000680	PG424G07FE00000681
PG424G07FE00000682	PG424G07FE00000683	PG424G07FE00000684	PG424G07FE00000685
PG424G07FE00000686	PG424G07FE00000688	PG424G07FE00000689	PG424G07FE00000690
PG424G07FE00000691	PG424G07FE00000692	PG424G07FE00000694	PG424G07FE00000695
PG424G07FE00000696	PG424G07FE00000697	PG424G07FE00000699	PG424G07FE00000700
PG424G07FE00000701	PG424G07FE00000702	PG424G07FE00000703	PG424G07FE00000704
PG424G07FE00000705	PG424G07FE00000710	PG424G07FE00000713	PG424G07FE00000714
PG424G07FE00000717	PG424G07FE00000718	PG424G07FE00000720	PG424G07FE00000722

PG424G07FE00000724	PG424G07FE00000737	PG424G07FE00000738	PG424G07FE00000741
PG424G07FE00000743	PG424G07FE00000745	PG424G07FE00000750	PG424G07FE00000755
PG424G07FE00000756	PG424G07FE00000758	PG424G07FE00000760	PG424G07FE00000762
PG424G07FE00000763	PG424G07FE00000764	PG424G07FE00000767	PG424G07FE00000770
PG424G07FE00000774	PG424G07FE00000778	PG424G07FE00000782	PG424G07FE00000783
PG424G07FE00000784	PG424G07FE00000786	PG424G07FE00000787	PG424G07FE00000788
PG424G07FE00000789	PG424G07FE00000792	PG424G07FE00000793	PG424G07FE00000794
PG424G07FE00000797	PG424G07FE00000799	PG424G07FE00000800	PG424G07FE00000808
PG424G07FE00000811	PG424G07FE00000813	PG424G07FE00000815	PG424G07FE00000818
PG424G07FE00000819	PG424G07FE00000821	PG424G07FE00000822	PG424G07FE00000825
PG424G07FE00000828	PG424G07FE00000830	PG424G07FE00000831	PG424G07FE00000832
PG424G07FE00000833	PG424G07FE00000834	PG424G07FE00000835	PG424G07FE00000836
PG424G07FE00000837	PG424G07FE00000838	PG424G07FE00000840	PG424G07FE00000841
PG424G07FE00000842	PG424G07FE00000844	PG424G07FE00000845	PG424G07FE00000846
PG424G07FE00000847	PG424G07FE00000848	PG424G07FE00000849	PG424G07FE00000850
PG424G07FE00000852	PG424G07FE00000853	PG424G07FE00000854	PG424G07FE00000855
PG424G07FE00000856	PG424G07FE00000857	PG424G07FE00000858	PG424G07FE00000860
PG424G07FE00000863	PG424G07FE00000864	PG424G07FE00000865	PG424G07FE00000866
PG424G07FE00000867	PG424G07FE00000868	PG424G07FE00000869	PG424G07FE00000873
PG424G07FE00000874	PG424G07FE00000875	PG424G07FE00000877	PG424G07FE00000878
PG424G07FE00000879	PG424G07FE00000880	PG424G07FE00000881	PG424G07FE00000882
PG424G07FE00000883	PG424G07FE00000884	PG424G07FE00000885	PG424G07FE00000886
PG424G07FE00000887	PG424G07FE00000888	PG424G07FE00000889	PG424G07FE00000890
PG424G07FE00000891	PG424G07FE00000892	PG424G07FE00000893	PG424G07FE00000894
PG424G07FE00000899	PG424G07FE00000901	PG424G07FE00000902	PG424G07FE00000904
PG424G07FE00000905	PG424G07FE00000907	PG424G07FE00000909	PG424G07FE00000910
PG424G07FE00000911	PG424G07FE00000913	PG424G07FE00000914	PG424G07FE00000915
PG424G07FE00000916	PG424G07FE00000922	PG424G07FE00000925	PG424G07FE00000930
PG424G07FE00000931	PG424G07FE00000933	PG424G07FE00000934	PG424G07FE00000935
PG424G07FE00000936	PG424G07FE00000937	PG424G07FE00000938	PG424G07FE00000939
PG424G07FE00000940	PG424G07FE00000941	PG424G07FE00000942	PG424G07FE00000943
PG424G07FE00000946	PG424G07FE00000949	PG424G07FE00000951	PG424G07FE00000952
PG424G07FE00000953	PG424G07FE00000954	PG424G07FE00000960	PG424G07FE00000961
PG424G07FE00000962	PG424G07FE00000963	PG424G07FE00000964	PG424G07FE00000965
PG424G07FE00000967	PG424G07FE00000968	PG424G07FE00000969	PG424G07FE00000970
PG424G07FE00000972	PG424G07FE00000973	PG424G07FE00000974	PG424G07FE00000975
PG424G07FE00000976	PG424G07FE00000977	PG424G07FE00000979	PG424G07FE00000980

PG424G07FE00000981	PG424G07FE00000982	PG424G07FE00000983	PG424G07FE00000984
PG424G07FE00000985	PG424G07FE00000986	PG424G07FE00000987	PG424G07FE00000989
PG424G07FE00000990	PG424G07FE00000991	PG424G07FE00000995	PG424G07FE00000997
PG424G07FE00000998	PG424G07FE00000999	PG424G07FE00001001	PG424G07FE00001002
PG424G07FE00001003	PG424G07FE00001004	PG424G07FE00001005	PG424G07FE00001006
PG424G07FE00001007	PG424G07FE00001008	PG424G07FE00001009	PG424G07FE00001010
PG424G07FE00001011	PG424G07FE00001013	PG424G07FE00001014	PG424G07FE00001015
PG424G07FE00001016	PG424G07FE00001017	PG424G07FE00001018	PG424G07FE00001020
PG424G07FE00001021	PG424G07FE00001024	PG424G07FE00001025	PG424G07FE00001026
PG424G07FE00001027	PG424G07FE00001028	PG424G07FE00001029	PG424G07FE00001030
PG424G07FE00001031	PG424G07FE00001032	PG424G07FE00001033	PG424G07FE00001034
PG424G07FE00001040	PG424G07FE00001041	PG424G07FE00001042	PG424G07FE00001043
PG424G07FE00001044	PG424G07FE00001046	PG424G07FE00001050	PG424G07FE00001051
PG424G07FE00001052	PG424G07FE00001054	PG424G07FE00001057	PG424G07FE00001058
PG424G07FE00001062	PG424G07FE00001063	PG424G07FE00001064	PG424G07FE00001065
PG424G07FE00001066	PG424G07FE00001067	PG424G07FE00001069	PG424G07FE00001072
PG424G07FE00001074	PG424G07FE00001075	PG424G07FE00001079	PG424G07FE00001107
PG424G07FE00001108	PG424G07FE00001109	PG424G07FE00001111	PG424G07FE00001112
PG424G07FE00001114	PG424G07FE00001116	PG424G07FE00001121	PG424G07FE00001122
PG424G07FE00001126	PG424G07FE00001128	PG424G07FE00001132	PG424G07FE00001134
PG424G07FE00001135	PG424G07FE00001137	PG424G07FE00001139	PG424G07FE00001140
PG424G07FE00001143	PG424G07FE00001146	PG424G07FE00001147	PG424G07FE00001151
PG424G07FE00001152	PG424G07FE00001153	PG424G07FE00001157	PG424G07FE00001161
PG424G07FE00001176	PG424G07FE00001178	PG424G07FE00001183	PG424G07FE00001191
PG424G07FE00001198	PG424G07FE00001203	PG424G07FE00001212	PG424G07FE00001216
PG424G07FE00001223	PG424G07FE00001226	PG424G07FE00001229	PG424G07FE00001231
PG424G07FE00001232	PG424G07FE00001233	PG424G07FE00001234	PG424G07FE00001236
PG424G07FE00001241	PG424G07FE00001245	PG424G07FE00001248	PG424G07FE00001251
PG424G07FE00001254	PG424G07FE00001260	PG424G07FE00001263	PG424G07FE00001266
PG424G07FE00001267	PG424G07FE00001271	PG424G07FE00001273	PG424G07FE00001276
PG424G07FE00001280	PG424G07FE00001290	PG424G07FE00001293	PG424G07FE00001294
PG424G07FE00001296	PG424G07FE00001304	PG424G07FE00001307	PG424G07FE00001313
PG424G07FE00001315	PG424G07FE00001360	PG424G07FE00001364	PG424G07FE00001369
PG424G07FE00001379	PG424G07FE00001383	PG424G07FE00001388	PG424G07FE00001406
PG424G07FE00001408	PG424G07FE00001414	PG424G07FE00001416	PG424G07FE00001423
PG424G07FE00001430	PG424G07FE00001437	PG424G07FE00001440	PG424G07FE00001443
PG424G07FE00001445	PG424G07FE00001451	PG424G07FE00001453	PG424G07FE00001454

dexcom

PG424G07FE00001456	PG424G07FE00001459	PG424G07FE00001461	PG424G07FE00001466
PG424G07FE00001469	PG424G07FE00001472	PG424G07FE00001473	PG424G07FE00001475
PG424G07FE00001479	PG424G07FE00001483	PG424G07FE00001487	PG424G07FE00001489
PG424G07FE00001492	PG424G07FE00001493	PG424G07FE00001495	PG424G07FE00001500
PG424G07FE00001504	PG424G07FE00001506	PG424G07FE00001508	PG424G07FE00001514
PG424G07FE00001520	PG424G07FE00001522	PG424G07FE00001523	PG424G07FE00001525
PG424G07FE00001532	PG424G07FE00001536	PG424G07FE00001541	PG424G07FE00001544
PG424G07FE00001550	PG424G07FE00001553	PG424G07FE00001554	PG424G07FE00001557
PG424G07FE00001558	PG424G07FE00001560	PG424G07FE00001561	PG424G07FE00001562
PG424G07FE00001563	PG424G07FE00001565	PG424G07FE00001567	PG424G07FE00001571
PG424G07FE00001574	PG424G07FE00001576	PG424G07FE00001577	PG424G07FE00001578
PG424G07FE00001579	PG424G07FE00001581	PG424G07FE00001586	PG424G07FE00001589
PG424G07FE00001592	PG424G07FE00001593	PG424G07FE00001597	PG424G07FE00001599
PG424G07FE00001600	PG424G07FE00001602	PG424G07FE00001606	PG424G07FE00001608
PG424G07FE00001620	PG424G07FE00001622	PG424G07FE00001626	PG424G07FE00001632
PG424G07FE00001639	PG424G07FE00001646	PG424G07FE00001648	PG424G07FE00001655
PG424G07FE00001658	PG424G07FE00001659	PG424G07FE00001661	PG424G07FE00001662
PG424G07FE00001664	PG424G07FE00001665	PG424G07FE00001667	PG424G07FE00001668
PG424G07FE00001670	PG424G07FE00001671	PG424G07FE00001673	PG424G07FE00001675
PG424G07FE00001678	PG424G07FE00001679	PG424G07FE00001682	PG424G07FE00001683
PG424G07FE00001686	PG424G07FE00001689	PG424G07FE00001691	PG424G07FE00001696
PG424G07FE00001701	PG424G07FE00001705	PG424G07FE00001707	PG424G07FE00001710
PG424G07FE00001711	PG424G07FE00001714	PG424G07FE00001717	PG424G07FE00001721
PG424G07FE00001724	PG424G07FE00001725	PG424G07FE00001726	PG424G07FE00001734
PG424G07FE00001735	PG424G07FE00001738	PG424G07FE00001739	PG424G07FE00001741
PG424G07FE00001743	PG424G07FE00001749	PG424G07FE00001750	PG424G07FE00001751
PG424G07FE00001753	PG424G07FE00001755	PG424G07FE00001757	PG424G07FE00001759
PG424G07FE00001761	PG424G07FE00001764	PG424G07FE00001768	PG424G07FE00001770
PG424G07FE00001772	PG424G07FE00001774	PG424G07FE00001775	PG424G07FE00001777
PG424G07FE00001778	PG424G07FE00001782	PG424G07FE00001784	PG424G07FE00001788
PG424G07FE00001790	PG424G07FE00001795	PG424G07FE00001797	PG424G07FE00001800
PG424G07FE00001801	PG424G07FE00001803	PG424G07FE00001804	PG424G07FE00001805
PG424G07FE00001806	PG424G07FE00001808	PG424G07FE00001810	PG424G07FE00001812
PG424G07FE00001824	PG424G07FE00001826	PG424G07FE00001828	PG424G07FE00001830
PG424G07FE00001832	PG424G07FE00001842	PG424G07FE00001845	PG424G07FE00001851
PG424G07FE00001854	PG424G07FE00001858	PG424G07FE00001871	PG424G07FE00001876
PG424G07FE00001879	PG424G07FE00001880	PG424G07FE00001883	PG424G07FE00001886

PG424G07FE00001894	PG424G07FE00001897	PG424G07FE00001903	PG424G07FE00001905
PG424G07FE00001909	PG424G07FE00001911	PG424G07FE00001912	PG424G07FE00001913
PG424G07FE00001916	PG424G07FE00001920	PG424G07FE00001921	PG424G07FE00001922
PG424G07FE00001924	PG424G07FE00001925	PG424G07FE00001926	PG424G07FE00001931
PG424G07FE00001933	PG424G07FE00001935	PG424G07FE00001936	PG424G07FE00001940
PG424G07FE00001941	PG424G07FE00001943	PG424G07FE00001945	PG424G07FE00001946
PG424G07FE00001948	PG424G07FE00001949	PG424G07FE00001951	PG424G07FE00001958
PG424G07FE00001959	PG424G07FE00001962	PG424G07FE00001964	PG424G07FE00001965
PG424G07FE00001967	PG424G07FE00001968	PG424G07FE00001980	PG424G07FE00001983
PG424G07FE00001984	PG424G07FE00001985	PG424G07FE00001988	PG424G07FE00001990
PG424G07FE00002012	PG424G07FE00002017	PG424G07FE00002024	PG424G07FE00002029
PG424G07FE00002035	PG424G07FE00002038	PG424G07FE00002042	PG424G07FE00002045
PG424G07FE00002047	PG424G07FE00002050	PG424G07FE00002051	PG424G07FE00002053
PG424G07FE00002059	PG424G07FE00002061	PG424G07FE00002065	PG424G07FE00002069
PG424G07FE00002071	PG424G07FE00002075	PG424G07FE00002076	PG424G07FE00002079
PG424G07FE00002080	PG424G07FE00002082	PG424G07FE00002091	PG424G07FE00002092
PG424G07FE00002093	PG424G07FE00002097	PG424G07FE00002099	PG424G07FE00002101
PG424G07FE00002185	PG424G07FE00002186	PG424G07FE00002187	PG424G07FE00002191
PG424G07FE00002196	PG424G07FE00002201	PG424G07FE00002202	PG424G07FE00002206
PG424G07FE00002207	PG424G07FE00002208	PG424G07FE00002209	PG424G07FE00002210
PG424G07FE00002211	PG424G07FE00002212	PG424G07FE00002217	PG424G07FE00002218
PG424G07FE00002220	PG424G07FE00002221	PG424G07FE00002223	PG424G07FE00002225
PG424G07FE00002226	PG424G07FE00002227	PG424G07FE00002228	PG424G07FE00002231
PG424G07FE00002232	PG424G07FE00002234	PG424G07FE00002235	PG424G07FE00002236
PG424G07FE00002237	PG424G07FE00002238	PG424G07FE00002240	PG424G07FE00002243
PG424G07FE00002250	PG424G07FE00002252	PG424G07FE00002256	PG424G07FE00002257
PG424G07FE00002260	PG424G07FE00002263	PG424G07FE00002265	PG424G07FE00002266
PG424G07FE00002268	PG424G07FE00002269	PG424G07FE00002270	PG424G07FE00002272
PG424G07FE00002273	PG424G07FE00002274	PG424G07FE00002275	PG424G07FE00002276
PG424G07FE00002278	PG424G07FE00002279	PG424G07FE00002280	PG424G07FE00002281
PG424G07FE00002283	PG424G07FE00002284	PG424G07FE00002285	PG424G07FE00002286
PG424G07FE00002287	PG424G07FE00002289	PG424G07FE00002290	PG424G07FE00002291
PG424G07FE00002292	PG424G07FE00002293	PG424G07FE00002294	PG424G07FE00002298
PG424G07FE00002299	PG424G07FE00002301	PG424G07FE00002302	PG424G07FE00002303
PG424G07FE00002309	PG424G07FE00002311	PG424G07FE00002312	PG424G07FE00002314
PG424G07FE00002315	PG424G07FE00002320	PG424G07FE00002321	PG424G07FE00002323
PG424G07FE00002324	PG424G07FE00002325	PG424G07FE00002326	PG424G07FE00002327

PG424G07FE00002328	PG424G07FE00002329	PG424G07FE00002330	PG424G07FE00002331
PG424G07FE00002332	PG424G07FE00002333	PG424G07FE00002335	PG424G07FE00002336
PG424G07FE00002338	PG424G07FE00002339	PG424G07FE00002340	PG424G07FE00002341
PG424G07FE00004824	PG424G07FE00004827	PG424G07FE00004833	PG424G07FE00004834
PG424G07FE00004838	PG424G07FE00004840	PG424G07FE00004846	PG424G07FE00004855
PG424G07FE00004856	PG424G07FE00004858	PG424G07FE00004860	PG424G07FE00004861
PG424G07FE00004863	PG424G07FE00004867	PG424G07FE00004874	PG424G07FE00004877
PG424G07FE00004884	PG424G07FE00004886	PG424G07FE00004887	PG424G07FE00004888
PG424G07FE00004890	PG424G07FE00004891	PG424G07FE00004892	PG424G07FE00004893
PG424G07FE00004895	PG424G07FE00004902	PG424G07FE00004912	PG424G07FE00004915
PG424G07FE00004917	PG424G07FE00004918	PG424G07FE00004919	PG424G07FE00004925
PG424G07FE00004933	PG424G07FE00004935	PG424G07FE00004937	PG424G07FE00004943
PG424G07FE00004947	PG424G07FE00004949	PG424G07FE00004950	PG424G07FE00004954
PG424G07FE00004956	PG424G07FE00004958	PG424G07FE00004963	PG424G07FE00004964
PG424G07FE00004977	PG424G07FE00004985	PG424G07FE00004991	PG424G07FE00004994
PG424G07FE00005011	PG424G07FE00005012	PG424G07FE00005014	PG424G07FE00005015
PG424G07FE00005016	PG424G07FE00005017	PG424G07FE00005020	PG424G07FE00005022
PG424G07FE00005025	PG424G07FE00005027	PG424G07FE00005029	PG424G07FE00005030
PG424G07FE00005031	PG424G07FE00005032	PG424G07FE00005034	PG424G07FE00005035
PG424G07FE00005039	PG424G07FE00005040	PG424G07FE00005041	PG424G07FE00005045
PG424G07FE00005049	PG424G07FE00005053	PG424G07FE00005054	PG424G07FE00005056
PG424G07FE00005058	PG424G07FE00005060	PG424G07FE00005061	PG424G07FE00005064
PG424G07FE00005065	PG424G07FE00005067	PG424G07FE00005069	PG424G07FE00005070
PG424G07FE00005072	PG424G07FE00005073	PG424G07FE00005074	PG424G07FE00005075
PG424G07FE00005077	PG424G07FE00005078	PG424G07FE00005081	PG424G07FE00005083
PG424G07FE00005084	PG424G07FE00005085	PG424G07FE00005087	PG424G07FE00005088
PG424G07FE00005089	PG424G07FE00005090	PG424G07FE00005091	PG424G07FE00005092
PG424G07FE00005093	PG424G07FE00005094	PG424G07FE00005096	PG424G07FE00005097
PG424G07FE00005099	PG424G07FE00005101	PG424G07FE00005104	PG424G07FE00005105
PG424G07FE00005108	PG424G07FE00005109	PG424G07FE00005110	PG424G07FE00005113
PG424G07FE00005115	PG424G07FE00005117	PG424G07FE00005118	PG424G07FE00005120
PG424G07FE00005124	PG424G07FE00005126	PG424G07FE00005127	PG424G07FE00005128
PG424G07FE00005130	PG424G07FE00005133	PG424G07FE00005134	PG424G07FE00005135
PG424G07FE00005136	PG424G07FE00005137	PG424G07FE00005138	PG424G07FE00005142
PG424G07FE00005150	PG424G07FE00005151	PG424G07FE00005155	PG424G07FE00005156
PG424G07FE00005159	PG424G07FE00005160	PG424G07FE00005162	PG424G07FE00005165
PG424G07FE00005167	PG424G07FE00005168	PG424G07FE00005171	PG424G07FE00005173

PG424G07FE00005174	PG424G07FE00005178	PG424G07FE00005180	PG424G07FE00005181
PG424G07FE00005185	PG424G07FE00005188	PG424G07FE00005190	PG424G07FE00005191
PG424G07FE00005193	PG424G07FE00005194	PG424G07FE00005196	PG424G07FE00005198
PG424G07FE00005199	PG424G07FE00005200	PG424G07FE00005202	PG424G07FE00005205
PG424G07FE00005208	PG424G07FE00005209	PG424G07FE00005210	PG424G07FE00005211
PG424G07FE00005212	PG424G07FE00005213	PG424G07FE00005214	PG424G07FE00005216
PG424G07FE00005218	PG424G07FE00005219	PG424G07FE00005220	PG424G07FE00005223
PG424G07FE00005224	PG424G07FE00005226	PG424G07FE00005228	PG424G07FE00005229
PG424G07FE00005232	PG424G07FE00005234	PG424G07FE00005235	PG424G07FE00005236
PG424G07FE00005237	PG424G07FE00005238	PG424G07FE00005239	PG424G07FE00005240
PG424G07FE00005241	PG424G07FE00005242	PG424G07FE00005244	PG424G07FE00005245
PG424G07FE00005247	PG424G07FE00005248	PG424G07FE00005249	PG424G07FE00005251
PG424G07FE00005252	PG424G07FE00005253	PG424G07FE00005254	PG424G07FE00005255
PG424G07FE00005257	PG424G07FE00005258	PG424G07FE00005260	PG424G07FE00005261
PG424G07FE00005262	PG424G07FE00005264	PG424G07FE00005265	PG424G07FE00005266
PG424G07FE00005267	PG424G07FE00005268	PG424G07FE00005269	PG424G07FE00005270
PG424G07FE00005271	PG424G07FE00005274	PG424G07FE00005275	PG424G07FE00005276
PG424G07FE00005277	PG424G07FE00005278	PG424G07FE00005279	PG424G07FE00005280
PG424G07FE00005281	PG424G07FE00005283	PG424G07FE00005284	PG424G07FE00005287
PG424G07FE00005288	PG424G07FE00005289	PG424G07FE00005290	PG424G07FE00005291
PG424G07FE00005292	PG424G07FE00005294	PG424G07FE00005295	PG424G07FE00005296
PG424G07FE00005298	PG424G07FE00005300	PG424G07FE00005301	PG424G07FE00005304
PG424G07FE00005305	PG424G07FE00005306	PG424G07FE00005308	PG424G07FE00005311
PG424G07FE00005312	PG424G07FE00005313	PG424G07FE00005316	PG424G07FE00005317
PG424G07FE00005318	PG424G07FE00005319	PG424G07FE00005321	PG424G07FE00005322
PG424G07FE00005323	PG424G07FE00005324	PG424G07FE00005325	PG424G07FE00005326
PG424G07FE00005327	PG424G07FE00005328	PG424G07FE00005329	PG424G07FE00005330
PG424G07FE00005331	PG424G07FE00005332	PG424G07FE00005334	PG424G07FE00005335
PG424G07FE00005336	PG424G07FE00005337	PG424G07FE00005339	PG424G07FE00005340
PG424G07FE00005341	PG424G07FE00005345	PG424G07FE00005346	PG424G07FE00005347
PG424G07FE00005348	PG424G07FE00005349	PG424G07FE00005351	PG424G07FE00005352
PG424G07FE00005353	PG424G07FE00005355	PG424G07FE00005357	PG424G07FE00005358
PG424G07FE00005359	PG424G07FE00005360	PG424G07FE00005361	PG424G07FE00005362
PG424G07FE00005363	PG424G07FE00005364	PG424G07FE00005365	PG424G07FE00005367
PG424G07FE00005370	PG424G07FE00005371	PG424G07FE00005372	PG424G07FE00005378
PG424G07FE00005379	PG424G07FE00008034	PG424G07FE00008040	PG424G07FE00008043
PG424G07FE00008045	PG424G07FE00008052	PG424G07FE00008053	PG424G07FE00008054

PG424G07FE00008055	PG424G07FE00008056	PG424G07FE00008057	PG424G07FE00008060
PG424G07FE00008068	PG424G07FE00008070	PG424G07FE00008078	PG424G07FE00008079
PG424G07FE00008081	PG424G07FE00008084	PG424G07FE00008086	PG424G07FE00008092
PG424G07FE00008094	PG424G07FE00008096	PG424G07FE00008102	PG424G07FE00008104
PG424G07FE00008106	PG424G07FE00008112	PG424G07FE00008115	PG424G07FE00008117
PG424G07FE00008120	PG424G07FE00008121	PG424G07FE00008122	PG424G07FE00008123
PG424G07FE00008125	PG424G07FE00008126	PG424G07FE00008128	PG424G07FE00008129
PG424G07FE00008131	PG424G07FE00008144	PG424G07FE00008145	PG424G07FE00008146
PG424G07FE00008148	PG424G07FE00008149	PG424G07FE00008150	PG424G07FE00008151
PG424G07FE00008152	PG424G07FE00008155	PG424G07FE00008156	PG424G07FE00008159
PG424G07FE00008160	PG424G07FE00008166	PG424G07FE00008167	PG424G07FE00008168
PG424G07FE00008170	PG424G07FE00008171	PG424G07FE00008172	PG424G07FE00008173
PG424G07FE00008174	PG424G07FE00008175	PG424G07FE00008177	PG424G07FE00008179
PG424G07FE00008182	PG424G07FE00008183	PG424G07FE00008185	PG424G07FE00008186
PG424G07FE00008187	PG424G07FE00008190	PG424G07FE00008191	PG424G07FE00008195
PG424G07FE00008196	PG424G07FE00008198	PG424G07FE00008200	PG424G07FE00008201
PG424G07FE00008206	PG424G07FE00008207	PG424G07FE00008208	PG424G07FE00008209
PG424G07FE00008210	PG424G07FE00008211	PG424G07FE00008213	PG424G07FE00008216
PG424G07FE00008218	PG424G07FE00008223	PG424G07FE00008226	PG424G07FE00008227
PG424G07FE00008228	PG424G07FE00008232	PG424G07FE00008233	PG424G07FE00008235
PG424G07FE00008237	PG424G07FE00008238	PG424G07FE00008239	PG424G07FE00008240
PG424G07FE00008241	PG424G07FE00008243	PG424G07FE00008244	PG424G07FE00008246
PG424G07FE00008247	PG424G07FE00008248	PG424G07FE00008250	PG424G07FE00008251
PG424G07FE00008252	PG424G07FE00008253	PG424G07FE00008254	PG424G07FE00008255
PG424G07FE00008256	PG424G07FE00008263	PG424G07FE00008264	PG424G07FE00008265
PG424G07FE00008266	PG424G07FE00008267	PG424G07FE00008268	PG424G07FE00008271
PG424G07FE00008274	PG424G07FE00008275	PG424G07FE00008280	PG424G07FE00008288
PG424G07FE00008292	PG424G07FE00008298	PG424G07FE00008299	PG424G07FE00008300
PG424G07FE00008301	PG424G07FE00008303	PG424G07FE00008304	PG424G07FE00008305
PG424G07FE00008307	PG424G07FE00008309	PG424G07FE00008310	PG424G07FE00008312
PG424G07FE00008313	PG424G07FE00008314	PG424G07FE00008336	PG424G07FE00008337
PG424G07FE00008339	PG424G07FE00008341	PG424G07FE00008343	PG424G07FE00008346
PG424G07FE00008351	PG424G07FE00008352	PG424G07FE00008355	PG424G07FE00008359
PG424G07FE00008362	PG424G07FE00008364	PG424G07FE00008366	PG424G07FE00008368
PG424G07FE00008370	PG424G07FE00008371	PG424G07FE00008373	PG424G07FE00008376
PG424G07FE00008381	PG424G07FE00008388	PG424G07FE00008389	PG424G07FE00008392
PG424G07FE00008394	PG424G07FE00008396	PG424G07FE00008397	PG424G07FE00008398

PG424G07FE00008399	PG424G07FE00008400	PG424G07FE00008402	PG424G07FE00008403
PG424G07FE00008404	PG424G07FE00008405	PG424G07FE00008407	PG424G07FE00008408
PG424G07FE00008410	PG424G07FE00008411	PG424G07FE00008419	PG424G07FE00008420
PG424G07FE00008421	PG424G07FE00008423	PG424G07FE00008424	PG424G07FE00008425
PG424G07FE00008427	PG424G07FE00008428	PG424G07FE00008429	PG424G07FE00008431
PG424G07FE00008432	PG424G07FE00008433	PG424G07FE00008435	PG424G07FE00008440
PG424G07FE00008442	PG424G07FE00008443	PG424G07FE00008445	PG424G07FE00008446
PG424G07FE00008451	PG424G07FE00008452	PG424G07FE00008453	PG424G07FE00008454
PG424G07FE00008456	PG424G07FE00008458	PG424G07FE00008461	PG424G07FE00008462
PG424G07FE00008467	PG424G07FE00008469	PG424G07FE00008470	PG424G07FE00008471
PG424G07FE00008473	PG424G07FE00008474	PG424G07FE00008475	PG424G07FE00008478
PG424G07FE00008479	PG424G07FE00008483	PG424G07FE00008484	PG424G07FE00008485
PG424G07FE00008486	PG424G07FE00008487	PG424G07FE00008489	PG424G07FE00008492
PG424G07FE00008493	PG424G07FE00008497	PG424G07FE00008498	PG424G07FE00008500
PG424G07FE00008501	PG424G07FE00008502	PG424G07FE00008503	PG424G07FE00008504
PG424G07FE00008508	PG424G07FE00008511	PG424G07FE00008512	PG424G07FE00008513
PG424G07FE00008514	PG424G07FE00008515	PG424G07FE00008525	PG424G07FE00008527
PG424G07FE00012135	PG424G07FE00012140	PG424G07FE00012142	PG424G07FE00012144
PG424G07FE00012147	PG424G07FE00012149	PG424G07FE00012152	PG424G07FE00012154
PG424G07FE00012161	PG424G07FE00012165	PG424G07FE00012166	PG424G07FE00012168
PG424G07FE00012170	PG424G07FE00012177	PG424G07FE00012178	PG424G07FE00012182
PG424G07FE00012183	PG424G07FE00012187	PG424G07FE00012198	PG424G07FE00012199
PG424G07FE00012203	PG424G07FE00012212	PG424G07FE00012213	PG424G07FE00012214
PG424G07FE00012218	PG424G07FE00012219	PG424G07FE00012235	PG424G07FE00012244
PG424G07FE00012250	PG424G07FE00012256	PG424G07FE00012260	PG424G07FE00012267
PG424G07FE00012280	PG424G07FE00012287	PG424G07FE00012297	PG424G07FE00012298
PG424G07FE00012305	PG424G07FE00012308	PG424G07FE00012310	PG424G07FE00012314
PG424G07FE00012316	PG424G07FE00012334	PG424G07FE00012340	PG424G07FE00012342
PG424G07FE00012343	PG424G07FE00012345	PG424G07FE00012347	PG424G07FE00012348
PG424G07FE00012351	PG424G07FE00012353	PG424G07FE00012358	PG424G07FE00012363
PG424G07FE00012365	PG424G07FE00012367	PG424G07FE00012369	PG424G07FE00012371
PG424G07FE00012373	PG424G07FE00012376	PG424G07FE00012378	PG424G07FE00012379
PG424G07FE00012382	PG424G07FE00012384	PG424G07FE00012386	PG424G07FE00012388
PG424G07FE00012390	PG424G07FE00012393	PG424G07FE00012394	PG424G07FE00012395
PG424G07FE00012397	PG424G07FE00012401	PG424G07FE00012406	PG424G07FE00012415
PG424G07FE00012416	PG424G07FE00012436	PG424G07FE00012438	PG424G07FE00012451
PG424G07FE00012453	PG424G07FE00012455	PG424G07FE00012457	PG424G07FE00012459

PG424G07FE00012462	PG424G07FE00012464	PG424G07FE00012465	PG424G07FE00012472
PG424G07FE00012475	PG424G07FE00012486	PG424G07FE00012489	PG424G07FE00012495
PG424G07FE00012503	PG424G07FE00012508	PG424G07FE00012512	PG424G07FE00012513
PG424G07FE00012532	PG424G07FE00012548	PG424G07FE00012553	PG424G07FE00012554
PG424G07FE00012556	PG424G07FE00012563	PG424G07FE00012567	PG424G07FE00012569
PG424G07FE00012575	PG424G07FE00012576	PG424G07FE00012580	PG424G07FE00012582
PG424G07FE00012586	PG424G07FE00012587	PG424G07FE00012588	PG424G07FE00012591
PG424G07FE00012593	PG424G07FE00012594	PG424G07FE00012597	PG424G07FE00012598
PG424G07FE00012600	PG424G07FE00012601	PG424G07FE00012603	PG424G07FE00012604
PG424G07FE00012614	PG424G07FE00012621	PG424G07FE00012622	PG424G07FE00012625
PG424G07FE00012626	PG424G07FE00012633	PG424G07FE00012635	PG424G07FE00012637
PG424G07FE00012638	PG424G07FE00012644	PG424G07FE00012645	PG424G07FE00012647
PG424G07FE00012650	PG424G07FE00012651	PG424G07FE00012652	PG424G07FE00012654
PG424G07FE00012655	PG424G07FE00012656	PG424G07FE00012658	PG424G07FE00012659
PG424G07FE00012662	PG424G07FE00012663	PG424G07FE00012665	PG424G07FE00012666
PG424G07FE00012668	PG424G07FE00012670	PG424G07FE00012671	PG424G07FE00012673
PG424G07FE00012686	PG424G07FE00012687	PG424G07FE00012689	PG424G07FE00012724
PG424G07FE00012726	PG424G07FE00012728	PG424G07FE00012729	PG424G07FE00012733
PG424G07FE00012734	PG424G07FE00012736	PG424G07FE00012737	PG424G07FE00012744
PG424G07FE00012746	PG424G07FE00012752	PG424G07FE00012753	PG424G07FE00012755
PG424G07FE00012766	PG424G07FE00012767	PG424G07FE00012772	PG424G07FE00012780
PG424G07FE00012781	PG424G07FE00012786	PG424G07FE00012787	PG424G07FE00012792
PG424G07FE00012793	PG424G07FE00012796	PG424G07FE00012802	PG424G07FE00012803
PG424G07FE00012852	PG424G07FE00012854	PG424G07FE00012855	PG424G07FE00012860
PG424G07FE00012861	PG424G07FE00012862	PG424G07FE00012863	PG424G07FE00012870
PG424G07FE00012872	PG424G07FE00012878	PG424G07FE00012880	PG424G07FE00012882
PG424G07FE00012883	PG424G07FE00012884	PG424G07FE00012888	PG424G07FE00012893
PG424G07FE00012895	PG424G07FE00012896	PG424G07FE00012901	PG424G07FE00012903
PG424G07FE00012907	PG424G07FE00012909	PG424G07FE00012911	PG424G07FE00012912
PG424G07FE00012914	PG424G07FE00012916	PG424G07FE00012921	PG424G07FE00012925
PG424G07FE00012937	PG424G07FE00012941	PG424G07FE00012944	PG424G07FE00012947
PG424G07FE00012952	PG424G07FE00012968	PG424G07FE00012970	PG424G07FE00012974
PG424G07FE00012975	PG424G07FE00012977	PG424G07FE00012979	PG424G07FE00012987
PG424G07FE00012993	PG424G07FE00012995	PG424G07FE00013000	PG424G07FE00013002
PG424G07FE00013003	PG424G07FE00013004	PG424G07FE00013005	PG424G07FE00013007
PG424G07FE00013010	PG424G07FE00013011	PG424G07FE00013017	PG424G07FE00013021
PG424G07FE00013033	PG424G07FE00013034	PG424G07FE00013036	PG424G07FE00013039

PG424G07FE00013040	PG424G07FE00013044	PG424G07FE00013046	PG424G07FE00013050
PG424G07FE00013051	PG424G07FE00013052	PG424G07FE00013055	PG424G07FE00013056
PG424G07FE00013061	PG424G07FE00013063	PG424G07FE00013072	PG424G07FE00013074
PG424G07FE00013075	PG424G07FE00013077	PG424G07FE00015134	PG424G07FE00015137
PG424G07FE00015138	PG424G07FE00015140	PG424G07FE00015141	PG424G07FE00015143
PG424G07FE00015151	PG424G07FE00015153	PG424G07FE00015160	PG424G07FE00015161
PG424G07FE00015173	PG424G07FE00015174	PG424G07FE00015178	PG424G07FE00015180
PG424G07FE00015182	PG424G07FE00015183	PG424G07FE00015184	PG424G07FE00015185
PG424G07FE00015186	PG424G07FE00015189	PG424G07FE00015193	PG424G07FE00015195
PG424G07FE00015197	PG424G07FE00015199	PG424G07FE00015200	PG424G07FE00015203
PG424G07FE00015206	PG424G07FE00015212	PG424G07FE00015214	PG424G07FE00015215
PG424G07FE00015218	PG424G07FE00015223	PG424G07FE00015227	PG424G07FE00015228
PG424G07FE00015230	PG424G07FE00015231	PG424G07FE00015233	PG424G07FE00015235
PG424G07FE00015238	PG424G07FE00015239	PG424G07FE00015241	PG424G07FE00015242
PG424G07FE00015243	PG424G07FE00015244	PG424G07FE00015245	PG424G07FE00015246
PG424G07FE00015249	PG424G07FE00015250	PG424G07FE00015251	PG424G07FE00015253
PG424G07FE00015254	PG424G07FE00015255	PG424G07FE00015256	PG424G07FE00015258
PG424G07FE00015259	PG424G07FE00015260	PG424G07FE00015262	PG424G07FE00015270
PG424G07FE00015271	PG424G07FE00015274	PG424G07FE00015275	PG424G07FE00015279
PG424G07FE00015280	PG424G07FE00015282	PG424G07FE00015283	PG424G07FE00015285
PG424G07FE00015287	PG424G07FE00015288	PG424G07FE00015290	PG424G07FE00015292
PG424G07FE00015295	PG424G07FE00015297	PG424G07FE00015299	PG424G07FE00015301
PG424G07FE00015302	PG424G07FE00015303	PG424G07FE00015305	PG424G07FE00015306
PG424G07FE00015307	PG424G07FE00015309	PG424G07FE00015311	PG424G07FE00015312
PG424G07FE00015317	PG424G07FE00015319	PG424G07FE00015320	PG424G07FE00015328
PG424G07FE00015330	PG424G07FE00015331	PG424G07FE00015333	PG424G07FE00015334
PG424G07FE00015335	PG424G07FE00015337	PG424G07FE00015345	PG424G07FE00015351
PG424G07FE00015353	PG424G07FE00015357	PG424G07FE00015358	PG424G07FE00015359
PG424G07FE00015360	PG424G07FE00015362	PG424G07FE00015363	PG424G07FE00015364
PG424G07FE00015365	PG424G07FE00015366	PG424G07FE00015367	PG424G07FE00015369
PG424G07FE00015370	PG424G07FE00015371	PG424G07FE00015375	PG424G07FE00015378
PG424G07FE00015381	PG424G07FE00015383	PG424G07FE00015388	PG424G07FE00015424
PG424G07FE00015425	PG424G07FE00015459	PG424G07FE00015460	PG424G07FE00015461
PG424G07FE00015462	PG424G07FE00015463	PG424G07FE00015464	PG424G07FE00015465
PG424G07FE00015466	PG424G07FE00015468	PG424G07FE00015469	PG424G07FE00015470
PG424G07FE00015471	PG424G07FE00015472	PG424G07FE00015473	PG424G07FE00015475
PG424G07FE00015476	PG424G07FE00015477	PG424G07FE00015481	PG424G07FE00015482

PG424G07FE00015487	PG424G07FE00015488	PG424G07FE00015489	PG424G07FE00015490
PG424G07FE00015491	PG424G07FE00015492	PG424G07FE00015493	PG424G07FE00015494
PG424G07FE00015495	PG424G07FE00015497	PG424G07FE00015498	PG424G07FE00015500
PG424G07FE00015501	PG424G07FE00015504	PG424G07FE00015505	PG424G07FE00015507
PG424G07FE00015508	PG424G07FE00015509	PG424G07FE00015512	PG424G07FE00015513
PG424G07FE00015515	PG424G07FE00015519	PG424G07FE00015522	PG424G07FE00015523
PG424G07FE00015525	PG424G07FE00015526	PG424G07FE00015527	PG424G07FE00015528
PG424G07FE00015529	PG424G07FE00015530	PG424G07FE00015532	PG424G07FE00015534
PG424G07FE00015535	PG424G07FE00015538	PG424G07FE00015541	PG424G07FE00015542
PG424G07FE00015543	PG424G07FE00015544	PG424G07FE00015545	PG424G07FE00015546
PG424G07FE00015547	PG424G07FE00015550	PG424G07FE00015551	PG424G07FE00015552
PG424G07FE00015553	PG424G07FE00015554	PG424G07FE00015555	PG424G07FE00015556
PG424G07FE00015557	PG424G07FE00015558	PG424G07FE00015559	PG424G07FE00015560
PG424G07FE00015561	PG424G07FE00015562	PG424G07FE00015563	PG424G07FE00015565
PG424G07FE00015566	PG424G07FE00015570	PG424G07FE00015571	PG424G07FE00015572
PG424G07FE00015574	PG424G07FE00015575	PG424G07FE00015576	PG424G07FE00015578
PG424G07FE00015579	PG424G07FE00015580	PG424G07FE00015581	PG424G07FE00015582
PG424G07FE00015584	PG424G07FE00015585	PG424G07FE00015586	PG424G07FE00015588
PG424G07FE00015589	PG424G07FE00015590	PG424G07FE00015591	PG424G07FE00015592
PG424G07FE00015593	PG424G07FE00015595	PG424G07FE00015596	PG424G07FE00015597
PG424G07FE00015598	PG424G07FE00015599	PG424G07FE00015605	PG424G07FE00015607
PG424G07FE00015609	PG424G07FE00015610	PG424G07FE00015611	PG424G07FE00015612
PG424G07FE00015613	PG424G07FE00015623	PG424G07FE00015624	PG424G07FE00015625
PG424G07FE00015628	PG424G07FE00015629	PG424G07FE00015630	PG424G07FE00015631
PG424G07FE00015632	PG424G07FE00015634	PG424G07FE00015635	PG424G07FE00015636
PG424G07FE00015638	PG424G07FE00015639	PG424G07FE00015642	PG424G07FE00015643
PG424G07FE00015645	PG424G07FE00015646	PG424G07FE00015647	PG424G07FE00015648
PG424G07FE00015649	PG424G07FE00015652	PG424G07FE00015653	PG424G07FE00015654
PG424G07FE00015655	PG424G07FE00015656	PG424G07FE00015659	PG424G07FE00015660
PG424G07FE00015661	PG424G07FE00015663	PG424G07FE00015664	PG424G07FE00015665
PG424G07FE00015666	PG424G07FE00015667	PG424G07FE00015668	PG424G07FE00015670
PG424G07FE00015671	PG424G07FE00015672	PG424G07FE00015673	PG424G07FE00015674
PG424G07FE00015675	PG424G07FE00015676	PG424G07FE00015677	PG424G07FE00015678
PG424G07FE00015679	PG424G07FE00015680	PG424G07FE00015681	PG424G07FE00015683
PG424G07FE00015684	PG424G07FE00015685	PG424G07FE00015686	PG424G07FE00015687
PG424G07FE00015688	PG424G07FE00015694	PG424G07FE00015695	PG424G07FE00015696
PG424G07FE00015697	PG424G07FE00015698	PG424G07FE00015699	PG424G07FE00015700

PG424G07FE00015701	PG424G07FE00015703	PG424G07FE00015705	PG424G07FE00015708
PG424G07FE00015710	PG424G07FE00015711	PG424G07FE00015712	PG424G07FE00015713
PG424G07FE00015714	PG424G07FE00015715	PG424G07FE00015717	PG424G07FE00015718
PG424G07FE00015719	PG424G07FE00015720	PG424G07FE00015721	PG424G07FE00015722
PG424G07FE00015723	PG424G07FE00015724	PG424G07FE00015725	PG424G07FE00015728
PG424G07FE00015729	PG424G07FE00015730	PG424G07FE00015733	PG424G07FE00015736
PG424G07FE00015737	PG424G07FE00015738	PG424G07FE00015741	PG424G07FE00015742
PG424G07FE00015744	PG424G07FE00015745	PG424G07FE00015747	PG424G07FE00015748
PG424G07FE00015750	PG424G07FE00015752	PG424G07FE00015754	PG424G07FE00015759
PG424G07FE00015760	PG424G07FE00015763	PG424G07FE00015765	PG424G07FE00015769
PG424G07FE00015771	PG424G07FE00015787	PG424G07FE00015790	PG424G07FE00015797
PG424G07FE00015798	PG424G07FE00015802	PG424G07FE00015803	PG424G07FE00015811
PG424G07FE00015812	PG424G07FE00015817	PG424G07FE00015835	PG424G07FE00015836
PG424G07FE00015837	PG424G07FE00015838	PG424G07FE00015840	PG424G07FE00015843
PG424G07FE00015845	PG424G07FE00015846	PG424G07FE00015847	PG424G07FE00015848
PG424G07FE00015849	PG424G07FE00015850	PG424G07FE00015851	PG424G07FE00015852
PG424G07FE00015853	PG424G07FE00015854	PG424G07FE00015855	PG424G07FE00015857
PG424G07FE00015858	PG424G07FE00015859	PG424G07FE00015860	PG424G07FE00015861
PG424G07FE00015862	PG424G07FE00015863	PG424G07FE00015864	PG424G07FE00015865
PG424G07FE00015866	PG424G07FE00015867	PG424G07FE00015868	PG424G07FE00015871
PG424G07FE00015873	PG424G07FE00015874	PG424G07FE00015876	PG424G07FE00015877
PG424G07FE00015880	PG424G07FE00015881	PG424G07FE00015882	PG424G07FE00015883
PG424G07FE00015884	PG424G07FE00015886	PG424G07FE00015887	PG424G07FE00015888
PG424G07FE00015889	PG424G07FE00015892	PG424G07FE00015894	PG424G07FE00015895
PG424G07FE00015896	PG424G07FE00015898	PG424G07FE00015899	PG424G07FE00015900
PG424G07FE00015901	PG424G07FE00015906	PG424G07FE00015907	PG424G07FE00015908
PG424G07FE00015909	PG424G07FE00015910	PG424G07FE00015911	PG424G07FE00015912
PG424G07FE00015914	PG424G07FE00015915	PG424G07FE00015916	PG424G07FE00015918
PG424G07FE00015920	PG424G07FE00015921	PG424G07FE00015922	PG424G07FE00015923
PG424G07FE00015924	PG424G07FE00015925	PG424G07FE00015926	PG424G07FE00015927
PG424G07FE00015928	PG424G07FE00015929	PG424G07FE00015930	PG424G07FE00015931
PG424G07FE00015934	PG424G07FE00015935	PG424G07FE00015936	PG424G07FE00015939
PG424G07FE00015940	PG424G07FE00015941	PG424G07FE00015943	PG424G07FE00015945
PG424G07FE00015947	PG424G07FE00015948	PG424G07FE00015950	PG424G07FE00015951
PG424G07FE00015952	PG424G07FE00015954	PG424G07FE00015955	PG424G07FE00015956
PG424G07FE00015958	PG424G07FE00015961	PG424G07FE00015963	PG424G07FE00015964
PG424G07FE00015965	PG424G07FE00015966	PG424G07FE00015967	PG424G07FE00015968

dexcom

PG424G07FE00015970	PG424G07FE00015971	PG424G07FE00015973	PG424G07FE00015975
PG424G07FE00015976	PG424G07FE00015977	PG424G07FE00015979	PG424G07FE00015980
PG424G07FE00015981	PG424G07FE00015982	PG424G07FE00015983	PG424G07FE00015984
PG424G07FE00015990	PG424G07FE00015991	PG424G07FE00015993	PG424G07FE00015994
PG424G07FE00015997	PG424G07FE00015999	PG424G07FE00016000	PG424G07FE00016002
PG424G07FE00016004	PG424G07FE00016005	PG424G07FE00016008	PG424G07FE00016009
PG424G07FE00016010	PG424G07FE00016011	PG424G07FE00016021	PG424G07FE00016023
PG424G07FE00016024	PG424G07FE00016025	PG424G07FE00016027	PG424G07FE00016032
PG424G07FE00016033	PG424G07FE00016039	PG424G07FE00016042	PG424G07FE00016046
PG424G07FE00016050	PG424G07FE00016052	PG424G07FE00016053	PG424G07FE00016055
PG424G07FE00016057	PG424G07FE00016058	PG424G07FE00016059	PG424G07FE00016060
PG424G07FE00016061	PG424G07FE00016063	PG424G07FE00016065	PG424G07FE00016066
PG424G07FE00016068	PG424G07FE00016072	PG424G07FE00016073	PG424G07FE00016075
PG424G07FE00016076	PG424G07FE00016077	PG424G07FE00016078	PG424G07FE00016079
PG424G07FE00016080	PG424G07FE00016081	PG424G07FE00016082	PG424G07FE00016083
PG424G07FE00016084	PG424G07FE00016085	PG424G07FE00016086	PG424G07FE00016088
PG424G07FE00016089	PG424G07FE00016090	PG424G07FE00016091	PG424G07FE00016093
PG424G07FE00016094	PG424G07FE00016095	PG424G07FE00016097	PG424G07FE00016099
PG424G07FE00016101	PG424G07FE00016103	PG424G07FE00016105	PG424G07FE00016106
PG424G07FE00016109	PG424G07FE00016111	PG424G07FE00018757	PG424G07FE00018770
PG424G07FE00018772	PG424G07FE00018774	PG424G07FE00018775	PG424G07FE00018777
PG424G07FE00018779	PG424G07FE00018781	PG424G07FE00018782	PG424G07FE00018784
PG424G07FE00018785	PG424G07FE00018786	PG424G07FE00018788	PG424G07FE00018790
PG424G07FE00018791	PG424G07FE00018792	PG424G07FE00018793	PG424G07FE00018794
PG424G07FE00018795	PG424G07FE00018796	PG424G07FE00018801	PG424G07FE00018803
PG424G07FE00018804	PG424G07FE00018807	PG424G07FE00018810	PG424G07FE00018813
PG424G07FE00018816	PG424G07FE00018818	PG424G07FE00018819	PG424G07FE00018822
PG424G07FE00018825	PG424G07FE00018827	PG424G07FE00018828	PG424G07FE00018831
PG424G07FE00018833	PG424G07FE00018837	PG424G07FE00018839	PG424G07FE00018843
PG424G07FE00018845	PG424G07FE00018846	PG424G07FE00018849	PG424G07FE00018852
PG424G07FE00018853	PG424G07FE00018856	PG424G07FE00018858	PG424G07FE00018860
PG424G07FE00018862	PG424G07FE00018864	PG424G07FE00018866	PG424G07FE00018867
PG424G07FE00018868	PG424G07FE00018869	PG424G07FE00018871	PG424G07FE00018877
PG424G07FE00018919	PG424G07FE00018922	PG424G07FE00019034	PG424G07FE00019035
PG424G07FE00019036	PG424G07FE00019037	PG424G07FE00019038	PG424G07FE00019039
PG424G07FE00019040	PG424G07FE00019041	PG424G07FE00019042	PG424G07FE00019043
PG424G07FE00019044	PG424G07FE00019045	PG424G07FE00019046	PG424G07FE00019047

PG424G07FE00019049	PG424G07FE00019050	PG424G07FE00019053	PG424G07FE00019055
PG424G07FE00019056	PG424G07FE00019057	PG424G07FE00019058	PG424G07FE00019059
PG424G07FE00019061	PG424G07FE00019062	PG424G07FE00019063	PG424G07FE00019064
PG424G07FE00019065	PG424G07FE00019069	PG424G07FE00019070	PG424G07FE00019071
PG424G07FE00019073	PG424G07FE00019074	PG424G07FE00019076	PG424G07FE00019077
PG424G07FE00019079	PG424G07FE00019080	PG424G07FE00019081	PG424G07FE00019082
PG424G07FE00019083	PG424G07FE00019085	PG424G07FE00019087	PG424G07FE00019088
PG424G07FE00019089	PG424G07FE00019090	PG424G07FE00019091	PG424G07FE00019092
PG424G07FE00019093	PG424G07FE00019094	PG424G07FE00019095	PG424G07FE00019096
PG424G07FE00019097	PG424G07FE00019098	PG424G07FE00019099	PG424G07FE00019101
PG424G07FE00019104	PG424G07FE00019105	PG424G07FE00019106	PG424G07FE00019107
PG424G07FE00019111	PG424G07FE00019112	PG424G07FE00019113	PG424G07FE00019114
PG424G07FE00019115	PG424G07FE00019117	PG424G07FE00019118	PG424G07FE00019120
PG424G07FE00019121	PG424G07FE00019122	PG424G07FE00019123	PG424G07FE00019124
PG424G07FE00019125	PG424G07FE00019126	PG424G07FE00019128	PG424G07FE00019129
PG424G07FE00019133	PG424G07FE00019134	PG424G07FE00019136	PG424G07FE00019139
PG424G07FE00019140	PG424G07FE00019142	PG424G07FE00019143	PG424G07FE00019144
PG424G07FE00019145	PG424G07FE00019146	PG424G07FE00019147	PG424G07FE00019148
PG424G07FE00019149	PG424G07FE00019150	PG424G07FE00019151	PG424G07FE00019152
PG424G07FE00019157	PG424G07FE00019160	PG424G07FE00019161	PG424G07FE00019162
PG424G07FE00019164	PG424G07FE00019165	PG424G07FE00019166	PG424G07FE00019167
PG424G07FE00019169	PG424G07FE00019170	PG424G07FE00019171	PG424G07FE00019172
PG424G07FE00019173	PG424G07FE00019174	PG424G07FE00019175	PG424G07FE00019176
PG424G07FE00019177	PG424G07FE00019178	PG424G07FE00019179	PG424G07FE00019181
PG424G07FE00019184	PG424G07FE00019185	PG424G07FE00019187	PG424G07FE00019188
PG424G07FE00019191	PG424G07FE00019195	PG424G07FE00019196	PG424G07FE00019199
PG424G07FE00019200	PG424G07FE00019201	PG424G07FE00019202	PG424G07FE00019203
PG424G07FE00019204	PG424G07FE00019207	PG424G07FE00019208	PG424G07FE00019209
PG424G07FE00019211	PG424G07FE00019212	PG424G07FE00019213	PG424G07FE00019216
PG424G07FE00019217	PG424G07FE00019219	PG424G07FE00019220	PG424G07FE00019221
PG424G07FE00019222	PG424G07FE00019223	PG424G07FE00019227	PG424G07FE00019230
PG424G07FE00019232	PG424G07FE00019234	PG424G07FE00019235	PG424G07FE00019236
PG424G07FE00019252	PG424G07FE00019253	PG424G07FE00019255	PG424G07FE00019256
PG424G07FE00019261	PG424G07FE00019262	PG424G07FE00019263	PG424G07FE00019264
PG424G07FE00019265	PG424G07FE00019266	PG424G07FE00019267	PG424G07FE00019268
PG424G07FE00019270	PG424G07FE00019271	PG424G07FE00019274	PG424G07FE00019275
PG424G07FE00019276	PG424G07FE00019278	PG424G07FE00019279	PG424G07FE00019280

PG424G07FE00019283	PG424G07FE00019284	PG424G07FE00019286	PG424G07FE00019287
PG424G07FE00019292	PG424G07FE00019293	PG424G07FE00019294	PG424G07FE00019295
PG424G07FE00019298	PG424G07FE00019299	PG424G07FE00019300	PG424G07FE00019302
PG424G07FE00019303	PG424G07FE00019311	PG424G07FE00019312	PG424G07FE00019313
PG424G07FE00019314	PG424G07FE00019315	PG424G07FE00019316	PG424G07FE00019317
PG424G07FE00019318	PG424G07FE00019319	PG424G07FE00019320	PG424G07FE00019322
PG424G07FE00019324	PG424G07FE00019325	PG424G07FE00019327	PG424G07FE00019329
PG424G07FE00019330	PG424G07FE00019334	PG424G07FE00019335	PG424G07FE00019336
PG424G07FE00019338	PG424G07FE00019341	PG424G07FE00019343	PG424G07FE00019344
PG424G07FE00019345	PG424G07FE00019346	PG424G07FE00019347	PG424G07FE00019348
PG424G07FE00019349	PG424G07FE00019350	PG424G07FE00019351	PG424G07FE00019353
PG424G07FE00019355	PG424G07FE00019359	PG424G07FE00019360	PG424G07FE00019361
PG424G07FE00019362	PG424G07FE00019363	PG424G07FE00019364	PG424G07FE00019365
PG424G07FE00019366	PG424G07FE00019367	PG424G07FE00019369	PG424G07FE00019370
PG424G07FE00019371	PG424G07FE00019372	PG424G07FE00019373	PG424G07FE00019374
PG424G07FE00019375	PG424G07FE00019376	PG424G07FE00019377	PG424G07FE00019378
PG424G07FE00019381	PG424G07FE00019383	PG424G07FE00019384	PG424G07FE00019385
PG424G07FE00019386	PG424G07FE00019387	PG424G07FE00019388	PG424G07FE00019389
PG424G07FE00019390	PG424G07FE00019391	PG424G07FE00019392	PG424G07FE00019393
PG424G07FE00019394	PG424G07FE00019396	PG424G07FE00019397	PG424G07FE00019399
PG424G07FE00019401	PG424G07FE00019404	PG424G07FE00019405	PG424G07FE00019409
PG424G07FE00019411	PG424G07FE00019414	PG424G07FE00019415	PG424G07FE00019416
PG424G07FE00019417	PG424G07FE00019418	PG425G07FE00001596	PG425G07FE00001604
PG425G07FE00001606	PG425G07FE00001610	PG425G07FE00001616	PG425G07FE00001617
PG425G07FE00001620	PG425G07FE00001622	PG425G07FE00001623	PG425G07FE00001624
PG425G07FE00001625	PG425G07FE00001626	PG425G07FE00001628	PG425G07FE00001631
PG425G07FE00001632	PG425G07FE00001634	PG425G07FE00001637	PG425G07FE00001642
PG425G07FE00001645	PG425G07FE00001646	PG425G07FE00001650	PG425G07FE00001652
PG425G07FE00001654	PG425G07FE00001657	PG425G07FE00001658	PG425G07FE00001660
PG425G07FE00001662	PG425G07FE00001684	PG425G07FE00001685	PG425G07FE00001686
PG425G07FE00001688	PG425G07FE00001689	PG425G07FE00001690	PG425G07FE00001691
PG425G07FE00001693	PG425G07FE00001694	PG425G07FE00001695	PG425G07FE00001696
PG425G07FE00001698	PG425G07FE00001700	PG425G07FE00001703	PG425G07FE00001704
PG425G07FE00001705	PG425G07FE00001709	PG425G07FE00001712	PG425G07FE00001713
PG425G07FE00001714	PG425G07FE00001716	PG425G07FE00001717	PG425G07FE00001718
PG425G07FE00001719	PG425G07FE00001720	PG425G07FE00001722	PG425G07FE00001723
PG425G07FE00001724	PG425G07FE00001725	PG425G07FE00001726	PG425G07FE00001728

PG425G07FE00001730	PG425G07FE00001731	PG425G07FE00001733	PG425G07FE00001734
PG425G07FE00001736	PG425G07FE00001737	PG425G07FE00001738	PG425G07FE00001739
PG425G07FE00001740	PG425G07FE00001741	PG425G07FE00001742	PG425G07FE00001743
PG425G07FE00001744	PG425G07FE00001745	PG425G07FE00001746	PG425G07FE00001747
PG425G07FE00001749	PG425G07FE00001750	PG425G07FE00001751	PG425G07FE00001752
PG425G07FE00001753	PG425G07FE00001754	PG425G07FE00001755	PG425G07FE00001756
PG425G07FE00001757	PG425G07FE00001758	PG425G07FE00001763	PG425G07FE00001764
PG425G07FE00001767	PG425G07FE00001768	PG425G07FE00001769	PG425G07FE00001770
PG425G07FE00001771	PG425G07FE00001773	PG425G07FE00001774	PG425G07FE00001775
PG425G07FE00001776	PG425G07FE00001777	PG425G07FE00001778	PG425G07FE00001779
PG425G07FE00001780	PG425G07FE00001782	PG425G07FE00001784	PG425G07FE00001785
PG425G07FE00001786	PG425G07FE00001787	PG425G07FE00001788	PG425G07FE00001789
PG425G07FE00001790	PG425G07FE00001791	PG425G07FE00001793	PG425G07FE00001794
PG425G07FE00001795	PG425G07FE00001796	PG425G07FE00001798	PG425G07FE00001800
PG425G07FE00001802	PG425G07FE00001803	PG425G07FE00001804	PG425G07FE00001807
PG425G07FE00001808	PG425G07FE00001809	PG425G07FE00001810	PG425G07FE00001812
PG425G07FE00001813	PG425G07FE00001814	PG425G07FE00001815	PG425G07FE00001816
PG425G07FE00001818	PG425G07FE00001819	PG425G07FE00001820	PG425G07FE00001821
PG425G07FE00001822	PG425G07FE00001823	PG425G07FE00001825	PG425G07FE00001826
PG425G07FE00001827	PG425G07FE00001828	PG425G07FE00001829	PG425G07FE00001830
PG425G07FE00001831	PG425G07FE00001834	PG425G07FE00001835	PG425G07FE00001836
PG425G07FE00001837	PG425G07FE00001838	PG425G07FE00001839	PG425G07FE00001840
PG425G07FE00001842	PG425G07FE00001843	PG425G07FE00001844	PG425G07FE00001845
PG425G07FE00001846	PG425G07FE00001849	PG425G07FE00001851	PG425G07FE00001852
PG425G07FE00001853	PG425G07FE00001854	PG425G07FE00001858	PG425G07FE00001859
PG425G07FE00001860	PG425G07FE00001861	PG425G07FE00001863	PG425G07FE00001864
PG425G07FE00001866	PG425G07FE00001867	PG425G07FE00001868	PG425G07FE00001869
PG425G07FE00001870	PG425G07FE00001871	PG425G07FE00001873	PG425G07FE00001875
PG425G07FE00001876	PG425G07FE00001877	PG425G07FE00001878	PG425G07FE00001879
PG425G07FE00001881	PG425G07FE00001882	PG425G07FE00001883	PG425G07FE00001884
PG425G07FE00001885	PG425G07FE00001886	PG425G07FE00001887	PG425G07FE00001888
PG425G07FE00001890	PG425G07FE00001893	PG425G07FE00001894	PG425G07FE00001895
PG425G07FE00001897	PG425G07FE00001898	PG425G07FE00001899	PG425G07FE00001900
PG425G07FE00001901	PG425G07FE00001902	PG425G07FE00001904	PG425G07FE00001906
PG425G07FE00001913	PG425G07FE00001914	PG425G07FE00001915	PG425G07FE00001916
PG425G07FE00001917	PG425G07FE00001918	PG425G07FE00001919	PG425G07FE00001920
PG425G07FE00001921	PG425G07FE00001922	PG425G07FE00001924	PG425G07FE00001927

PG425G07FE00001928	PG425G07FE00001929	PG425G07FE00001931	PG425G07FE00001932
PG425G07FE00001933	PG425G07FE00001934	PG425G07FE00001935	PG425G07FE00001936
PG425G07FE00001937	PG425G07FE00001938	PG425G07FE00001939	PG425G07FE00001940
PG425G07FE00001941	PG425G07FE00001942	PG425G07FE00001943	PG425G07FE00001944
PG425G07FE00001945	PG425G07FE00001947	PG425G07FE00001951	PG425G07FE00001957
PG425G07FE00001962	PG425G07FE00001965	PG425G07FE00001967	PG425G07FE00001968
PG425G07FE00001970	PG425G07FE00001972	PG425G07FE00001973	PG425G07FE00001975
PG425G07FE00001981	PG425G07FE00003853	PG425G07FE00003856	PG425G07FE00003857
PG425G07FE00003860	PG425G07FE00003862	PG425G07FE00003868	PG425G07FE00003869
PG425G07FE00003871	PG425G07FE00003873	PG425G07FE00003874	PG425G07FE00003875
PG425G07FE00003876	PG425G07FE00003877	PG425G07FE00003878	PG425G07FE00003879
PG425G07FE00003880	PG425G07FE00003883	PG425G07FE00003890	PG425G07FE00003903
PG425G07FE00003906	PG425G07FE00003909	PG425G07FE00003912	PG425G07FE00003918
PG425G07FE00003922	PG425G07FE00003926	PG425G07FE00003928	PG425G07FE00003929
PG425G07FE00003930	PG425G07FE00003934	PG425G07FE00003948	PG425G07FE00003951
PG425G07FE00003955	PG425G07FE00003956	PG425G07FE00003963	PG425G07FE00003965
PG425G07FE00003968	PG425G07FE00003971	PG425G07FE00003972	PG425G07FE00003973
PG425G07FE00003974	PG425G07FE00003975	PG425G07FE00003983	PG425G07FE00003986
PG425G07FE00003988	PG425G07FE00003990	PG425G07FE00003993	PG425G07FE00003995
PG425G07FE00003996	PG425G07FE00003997	PG425G07FE00003999	PG425G07FE00004000
PG425G07FE00004003	PG425G07FE00004006	PG425G07FE00004009	PG425G07FE00004010
PG425G07FE00004012	PG425G07FE00004016	PG425G07FE00004018	PG425G07FE00004020
PG425G07FE00004022	PG425G07FE00004028	PG425G07FE00004029	PG425G07FE00004034
PG425G07FE00004038	PG425G07FE00004047	PG425G07FE00004050	PG425G07FE00004051
PG425G07FE00004053	PG425G07FE00004055	PG425G07FE00004056	PG425G07FE00004057
PG425G07FE00004060	PG425G07FE00004063	PG425G07FE00004064	PG425G07FE00004065
PG425G07FE00004069	PG425G07FE00004090	PG425G07FE00004095	PG425G07FE00004096
PG425G07FE00004097	PG425G07FE00004098	PG425G07FE00004099	PG425G07FE00004100
PG425G07FE00004103	PG425G07FE00004104	PG425G07FE00004105	PG425G07FE00004108
PG425G07FE00004109	PG425G07FE00004110	PG425G07FE00004111	PG425G07FE00004112
PG425G07FE00004113	PG425G07FE00004117	PG425G07FE00004118	PG425G07FE00004119
PG425G07FE00004120	PG425G07FE00004123	PG425G07FE00004125	PG425G07FE00004126
PG425G07FE00004128	PG425G07FE00004130	PG425G07FE00004132	PG425G07FE00004134
PG425G07FE00004135	PG425G07FE00004137	PG425G07FE00004138	PG425G07FE00004139
PG425G07FE00004141	PG425G07FE00004146	PG425G07FE00004147	PG425G07FE00004149
PG425G07FE00004151	PG425G07FE00004153	PG425G07FE00004156	PG425G07FE00004157
PG425G07FE00004158	PG425G07FE00004159	PG425G07FE00004160	PG425G07FE00004161

PG425G07FE00004162	PG425G07FE00004163	PG425G07FE00004164	PG425G07FE00004167
PG425G07FE00004169	PG425G07FE00004170	PG425G07FE00004171	PG425G07FE00004173
PG425G07FE00004174	PG425G07FE00004175	PG425G07FE00004178	PG425G07FE00004179
PG425G07FE00004183	PG425G07FE00004184	PG425G07FE00004188	PG425G07FE00004190
PG425G07FE00004194	PG425G07FE00004195	PG425G07FE00004201	PG425G07FE00004204
PG425G07FE00004206	PG425G07FE00004207	PG425G07FE00004208	PG425G07FE00004209
PG425G07FE00004210	PG425G07FE00004215	PG425G07FE00004216	PG425G07FE00004224
PG425G07FE00004225	PG425G07FE00004226	PG425G07FE00004227	PG425G07FE00004228
PG425G07FE00004233	PG425G07FE00004234	PG425G07FE00004236	PG425G07FE00004238
PG425G07FE00004239	PG425G07FE00004240	PG425G07FE00004241	PG425G07FE00004242
PG425G07FE00004244	PG425G07FE00004245	PG425G07FE00004246	PG425G07FE00004247
PG425G07FE00004248	PG425G07FE00004250	PG425G07FE00004253	PG425G07FE00004254
PG425G07FE00004255	PG425G07FE00004257	PG425G07FE00004259	PG425G07FE00004261
PG425G07FE00004263	PG425G07FE00004264	PG425G07FE00004265	PG425G07FE00004266
PG425G07FE00004268	PG425G07FE00004270	PG425G07FE00004271	PG425G07FE00004272
PG425G07FE00004273	PG425G07FE00004274	PG425G07FE00004275	PG425G07FE00004276
PG425G07FE00004277	PG425G07FE00004278	PG425G07FE00004279	PG425G07FE00004280
PG425G07FE00004283	PG425G07FE00004284	PG425G07FE00004285	PG425G07FE00004286
PG425G07FE00004289	PG425G07FE00004290	PG425G07FE00004291	PG425G07FE00004292
PG425G07FE00004294	PG425G07FE00004295	PG425G07FE00004296	PG425G07FE00004297
PG425G07FE00004299	PG425G07FE00004300	PG425G07FE00004301	PG425G07FE00004302
PG425G07FE00004303	PG425G07FE00004304	PG425G07FE00004306	PG425G07FE00004307
PG425G07FE00004308	PG425G07FE00004309	PG425G07FE00004310	PG425G07FE00004311
PG425G07FE00004312	PG425G07FE00004313	PG425G07FE00004314	PG425G07FE00004315
PG425G07FE00004316	PG425G07FE00004317	PG425G07FE00004318	PG425G07FE00004319
PG425G07FE00004320	PG425G07FE00004321	PG425G07FE00004322	PG425G07FE00004323
PG425G07FE00004324	PG425G07FE00004325	PG425G07FE00004327	PG425G07FE00004330
PG425G07FE00004331	PG425G07FE00004332	PG425G07FE00004334	PG425G07FE00004335
PG425G07FE00004336	PG425G07FE00004337	PG425G07FE00004338	PG425G07FE00004339
PG425G07FE00004340	PG425G07FE00004342	PG425G07FE00004343	PG425G07FE00004344
PG425G07FE00004345	PG425G07FE00004346	PG425G07FE00004347	PG425G07FE00004348
PG425G07FE00004349	PG425G07FE00004352	PG425G07FE00004353	PG425G07FE00004354
PG425G07FE00004355	PG425G07FE00004356	PG425G07FE00004357	PG425G07FE00004358
PG425G07FE00004359	PG425G07FE00004360	PG425G07FE00004362	PG425G07FE00004363
PG425G07FE00004364	PG425G07FE00004365	PG425G07FE00004366	PG425G07FE00004367
PG425G07FE00004368	PG425G07FE00004369	PG425G07FE00004370	PG425G07FE00004371
PG425G07FE00004372	PG425G07FE00004373	PG425G07FE00004374	PG425G07FE00004375

PG425G07FE00004377	PG425G07FE00004378	PG425G07FE00004379	PG425G07FE00004381
PG425G07FE00004382	PG425G07FE00004383	PG425G07FE00004384	PG425G07FE00004385
PG425G07FE00004386	PG425G07FE00004388	PG425G07FE00004389	PG425G07FE00004390
PG425G07FE00004391	PG425G07FE00004392	PG425G07FE00004393	PG425G07FE00004394
PG425G07FE00004396	PG425G07FE00004397	PG425G07FE00004398	PG425G07FE00004399
PG425G07FE00004400	PG425G07FE00004401	PG425G07FE00004402	PG425G07FE00004405
PG425G07FE00004407	PG425G07FE00004408	PG425G07FE00004409	PG425G07FE00004411
PG425G07FE00004412	PG425G07FE00004413	PG425G07FE00004415	PG425G07FE00004416
PG425G07FE00004417	PG425G07FE00004419	PG425G07FE00004420	PG425G07FE00004421
PG425G07FE00004422	PG425G07FE00004424	PG425G07FE00004425	PG425G07FE00004426
PG425G07FE00004427	PG425G07FE00004428	PG425G07FE00004429	PG425G07FE00004431
PG425G07FE00004432	PG425G07FE00004436	PG425G07FE00004437	PG425G07FE00004439
PG425G07FE00004440	PG425G07FE00004441	PG425G07FE00004442	PG425G07FE00004443
PG425G07FE00004444	PG425G07FE00004445	PG425G07FE00004446	PG425G07FE00004447
PG425G07FE00004450	PG425G07FE00004451	PG425G07FE00004452	PG425G07FE00004454
PG425G07FE00004456	PG425G07FE00004457	PG425G07FE00004459	PG425G07FE00004460
PG425G07FE00004462	PG425G07FE00004463	PG425G07FE00004464	PG425G07FE00004465
PG425G07FE00004466	PG425G07FE00004467	PG425G07FE00004468	PG425G07FE00004470
PG425G07FE00004473	PG425G07FE00004474	PG425G07FE00004475	PG425G07FE00004477
PG425G07FE00004478	PG425G07FE00004480	PG425G07FE00004482	PG425G07FE00004483
PG425G07FE00004484	PG425G07FE00004485	PG425G07FE00004486	PG425G07FE00004487
PG425G07FE00004489	PG425G07FE00004495	PG425G07FE00004496	PG425G07FE00004499
PG425G07FE00004500	PG425G07FE00004501	PG425G07FE00004502	PG425G07FE00004503
PG425G07FE00004504	PG425G07FE00004505	PG425G07FE00004507	PG425G07FE00004510
PG425G07FE00004512	PG425G07FE00004516	PG425G07FE00004517	PG425G07FE00004518
PG425G07FE00004519	PG425G07FE00004521	PG425G07FE00004522	PG425G07FE00004523
PG425G07FE00004524	PG425G07FE00004525	PG425G07FE00004526	PG425G07FE00004527
PG425G07FE00004528	PG425G07FE00004529	PG425G07FE00004530	PG425G07FE00004531
PG425G07FE00004532	PG425G07FE00004533	PG425G07FE00004535	PG425G07FE00004537
PG425G07FE00004540	PG425G07FE00004541	PG425G07FE00004542	PG425G07FE00004544
PG425G07FE00004545	PG425G07FE00004546	PG425G07FE00004547	PG425G07FE00004548
PG425G07FE00004550	PG425G07FE00004552	PG425G07FE00004554	PG425G07FE00004555
PG425G07FE00004558	PG425G07FE00004560	PG425G07FE00004561	PG425G07FE00004562
PG425G07FE00004563	PG425G07FE00004564	PG425G07FE00004565	PG425G07FE00004566
PG425G07FE00004581	PG425G07FE00004584	PG425G07FE00004586	PG425G07FE00004588
PG425G07FE00004589	PG425G07FE00004591	PG425G07FE00004593	PG425G07FE00004594
PG425G07FE00004596	PG425G07FE00004597	PG425G07FE00004601	PG425G07FE00004602

PG425G07FE00004603	PG425G07FE00004604	PG425G07FE00004605	PG425G07FE00004608
PG425G07FE00004610	PG425G07FE00004611	PG425G07FE00004612	PG425G07FE00004614
PG425G07FE00004615	PG425G07FE00004617	PG425G07FE00004619	PG425G07FE00004624
PG425G07FE00004625	PG425G07FE00004626	PG425G07FE00004627	PG425G07FE00004628
PG425G07FE00004629	PG425G07FE00004631	PG425G07FE00004632	PG425G07FE00004636
PG425G07FE00004637	PG425G07FE00004638	PG425G07FE00004639	PG425G07FE00004643
PG425G07FE00004644	PG425G07FE00004645	PG425G07FE00004646	PG425G07FE00004647
PG425G07FE00004649	PG425G07FE00004650	PG425G07FE00004651	PG425G07FE00004652
PG425G07FE00004653	PG425G07FE00004655	PG425G07FE00004656	PG425G07FE00004657
PG425G07FE00004658	PG425G07FE00004659	PG425G07FE00004660	PG425G07FE00004661
PG425G07FE00004662	PG425G07FE00004663	PG425G07FE00004664	PG425G07FE00004665
PG425G07FE00004666	PG425G07FE00004667	PG425G07FE00004668	PG425G07FE00004669
PG425G07FE00004671	PG425G07FE00004672	PG425G07FE00004673	PG425G07FE00004674
PG425G07FE00004675	PG425G07FE00004676	PG425G07FE00004677	PG425G07FE00004678
PG425G07FE00004679	PG425G07FE00004680	PG425G07FE00004681	PG425G07FE00004682
PG425G07FE00004684	PG425G07FE00004685	PG425G07FE00004686	PG425G07FE00004688
PG425G07FE00004689	PG425G07FE00004692	PG425G07FE00004693	PG425G07FE00004694
PG425G07FE00004696	PG425G07FE00004697	PG425G07FE00004700	PG425G07FE00004701
PG425G07FE00004702	PG425G07FE00004703	PG425G07FE00004704	PG425G07FE00004705
PG425G07FE00004706	PG425G07FE00004707	PG425G07FE00004710	PG425G07FE00004711
PG425G07FE00004712	PG425G07FE00004714	PG425G07FE00004715	PG425G07FE00004716
PG425G07FE00004717	PG425G07FE00004718	PG425G07FE00004719	PG425G07FE00004720
PG425G07FE00004722	PG425G07FE00004723	PG425G07FE00004724	PG425G07FE00004725
PG425G07FE00004726	PG425G07FE00004727	PG425G07FE00004728	PG425G07FE00004729
PG425G07FE00004730	PG425G07FE00004731	PG425G07FE00004733	PG425G07FE00004734
PG425G07FE00004739	PG425G07FE00004740	PG425G07FE00004741	PG425G07FE00004743
PG425G07FE00004744	PG425G07FE00004745	PG425G07FE00004746	PG425G07FE00004747
PG425G07FE00004748	PG425G07FE00004750	PG425G07FE00004751	PG425G07FE00004752
PG425G07FE00004754	PG425G07FE00004755	PG425G07FE00004757	PG425G07FE00004758
PG425G07FE00004759	PG425G07FE00004760	PG425G07FE00004761	PG425G07FE00004765
PG425G07FE00004766	PG425G07FE00004767	PG425G07FE00004769	PG425G07FE00004770
PG425G07FE00004771	PG425G07FE00004773	PG425G07FE00004774	PG425G07FE00004775
PG425G07FE00004776	PG425G07FE00004777	PG425G07FE00004778	PG425G07FE00004779
PG425G07FE00004780	PG425G07FE00004781	PG425G07FE00004782	PG425G07FE00004783
PG425G07FE00004784	PG425G07FE00004787	PG425G07FE00004789	PG425G07FE00004790
PG425G07FE00004791	PG425G07FE00004792	PG425G07FE00004793	PG425G07FE00004794
PG425G07FE00004796	PG425G07FE00004797	PG425G07FE00004798	PG425G07FE00008668

PG425G07FE00008684	PG425G07FE00008688	PG425G07FE00008691	PG425G07FE00008695
PG425G07FE00008698	PG425G07FE00008701	PG425G07FE00008705	PG425G07FE00008708
PG425G07FE00008715	PG425G07FE00008718	PG425G07FE00008725	PG425G07FE00008728
PG425G07FE00008731	PG425G07FE00008733	PG425G07FE00008735	PG425G07FE00008741
PG425G07FE00008744	PG425G07FE00008747	PG425G07FE00008749	PG425G07FE00008753
PG425G07FE00008766	PG425G07FE00008768	PG425G07FE00008770	PG425G07FE00008771
PG425G07FE00008774	PG425G07FE00008777	PG425G07FE00008780	PG425G07FE00008788
PG425G07FE00008791	PG425G07FE00008795	PG425G07FE00008797	PG425G07FE00008800
PG425G07FE00008802	PG425G07FE00008804	PG425G07FE00008805	PG425G07FE00008806
PG425G07FE00008807	PG425G07FE00008808	PG425G07FE00008809	PG425G07FE00008810
PG425G07FE00008811	PG425G07FE00008812	PG425G07FE00008813	PG425G07FE00008814
PG425G07FE00008815	PG425G07FE00008816	PG425G07FE00008817	PG425G07FE00008819
PG425G07FE00008820	PG425G07FE00008822	PG425G07FE00008823	PG425G07FE00008824
PG425G07FE00008825	PG425G07FE00008826	PG425G07FE00008827	PG425G07FE00008829
PG425G07FE00008830	PG425G07FE00008831	PG425G07FE00008832	PG425G07FE00008833
PG425G07FE00008835	PG425G07FE00008836	PG425G07FE00008837	PG425G07FE00008838
PG425G07FE00008839	PG425G07FE00008840	PG425G07FE00008842	PG425G07FE00008846
PG425G07FE00008847	PG425G07FE00008848	PG425G07FE00008850	PG425G07FE00008851
PG425G07FE00008852	PG425G07FE00008853	PG425G07FE00008854	PG425G07FE00008855
PG425G07FE00008856	PG425G07FE00008859	PG425G07FE00008860	PG425G07FE00008861
PG425G07FE00008862	PG425G07FE00008866	PG425G07FE00008869	PG425G07FE00008870
PG425G07FE00008872	PG425G07FE00008874	PG425G07FE00008875	PG425G07FE00008876
PG425G07FE00008877	PG425G07FE00008878	PG425G07FE00008879	PG425G07FE00008880
PG425G07FE00008881	PG425G07FE00008882	PG425G07FE00008883	PG425G07FE00008884
PG425G07FE00008885	PG425G07FE00008886	PG425G07FE00008887	PG425G07FE00008888
PG425G07FE00008889	PG425G07FE00008890	PG425G07FE00008892	PG425G07FE00008893
PG425G07FE00008894	PG425G07FE00008895	PG425G07FE00008897	PG425G07FE00008898
PG425G07FE00008900	PG425G07FE00008905	PG425G07FE00008907	PG425G07FE00008909
PG425G07FE00008912	PG425G07FE00008917	PG425G07FE00008918	PG425G07FE00008922
PG425G07FE00011012	PG425G07FE00011013	PG425G07FE00011014	PG425G07FE00011015
PG425G07FE00011016	PG425G07FE00011017	PG425G07FE00011018	PG425G07FE00011019
PG425G07FE00011020	PG425G07FE00011021	PG425G07FE00011022	PG425G07FE00011023
PG425G07FE00011024	PG425G07FE00011025	PG425G07FE00011027	PG425G07FE00011028
PG425G07FE00011029	PG425G07FE00011030	PG425G07FE00011031	PG425G07FE00011032
PG425G07FE00011033	PG425G07FE00011035	PG425G07FE00011036	PG425G07FE00011037
PG425G07FE00011038	PG425G07FE00011039	PG425G07FE00011040	PG425G07FE00011041
PG425G07FE00011042	PG425G07FE00011044	PG425G07FE00011045	PG425G07FE00011046

PG425G07FE00011048	PG425G07FE00011050	PG425G07FE00011051	PG425G07FE00011052
PG425G07FE00011054	PG425G07FE00011055	PG425G07FE00011056	PG425G07FE00011057
PG425G07FE00011058	PG425G07FE00011059	PG425G07FE00011063	PG425G07FE00011065
PG425G07FE00011067	PG425G07FE00011070	PG425G07FE00011071	PG425G07FE00011072
PG425G07FE00011073	PG425G07FE00011074	PG425G07FE00011077	PG425G07FE00011078
PG425G07FE00011079	PG425G07FE00011080	PG425G07FE00011083	PG425G07FE00011084
PG425G07FE00011085	PG425G07FE00011086	PG425G07FE00011089	PG425G07FE00011090
PG425G07FE00011091	PG425G07FE00011092	PG425G07FE00011093	PG425G07FE00011094
PG425G07FE00011095	PG425G07FE00011102	PG425G07FE00011103	PG425G07FE00011104
PG425G07FE00011105	PG425G07FE00011106	PG425G07FE00011107	PG425G07FE00011108
PG425G07FE00011109	PG425G07FE00011110	PG425G07FE00011112	PG425G07FE00011114
PG425G07FE00011115	PG425G07FE00011116	PG425G07FE00011117	PG425G07FE00011118
PG425G07FE00011119	PG425G07FE00011120	PG425G07FE00011121	PG425G07FE00011122
PG425G07FE00011123	PG425G07FE00011124	PG425G07FE00011125	PG425G07FE00011126
PG425G07FE00011127	PG425G07FE00011128	PG425G07FE00011129	PG425G07FE00011130
PG425G07FE00011131	PG425G07FE00011132	PG425G07FE00011134	PG425G07FE00011135
PG425G07FE00011136	PG425G07FE00011137	PG425G07FE00011138	PG425G07FE00011139
PG425G07FE00011140	PG425G07FE00011141	PG425G07FE00011147	PG425G07FE00011149
PG425G07FE00011150	PG425G07FE00011151	PG425G07FE00011153	PG425G07FE00011154
PG425G07FE00011155	PG425G07FE00011156	PG425G07FE00011157	PG425G07FE00011159
PG425G07FE00011160	PG425G07FE00011161	PG425G07FE00011162	PG425G07FE00011163
PG425G07FE00011166	PG425G07FE00011167	PG425G07FE00011168	PG425G07FE00011170
PG425G07FE00011171	PG425G07FE00011172	PG425G07FE00011173	PG425G07FE00011174
PG425G07FE00011176	PG425G07FE00011177	PG425G07FE00011178	PG425G07FE00011179
PG425G07FE00011180	PG425G07FE00011181	PG425G07FE00011182	PG425G07FE00011183
PG425G07FE00011185	PG425G07FE00011186	PG425G07FE00011187	PG425G07FE00011188
PG425G07FE00011190	PG425G07FE00011191	PG425G07FE00011192	PG425G07FE00011193
PG425G07FE00011194	PG425G07FE00011195	PG425G07FE00011196	PG425G07FE00011197
PG425G07FE00011198	PG425G07FE00011199	PG425G07FE00011200	PG425G07FE00011201
PG425G07FE00011202	PG425G07FE00011203	PG425G07FE00011204	PG425G07FE00011205
PG425G07FE00011207	PG425G07FE00011208	PG425G07FE00011209	PG425G07FE00011211
PG425G07FE00011212	PG425G07FE00011214	PG425G07FE00011215	PG425G07FE00011216
PG425G07FE00011217	PG425G07FE00011218	PG425G07FE00011220	PG425G07FE00011222
PG425G07FE00011223	PG425G07FE00011224	PG425G07FE00011225	PG425G07FE00011226
PG425G07FE00011227	PG425G07FE00011228	PG425G07FE00011229	PG425G07FE00011230
PG425G07FE00011231	PG425G07FE00011232	PG425G07FE00011233	PG425G07FE00011235
PG425G07FE00011236	PG425G07FE00011238	PG425G07FE00011239	PG425G07FE00011240

PG425G07FE00011241	PG425G07FE00011242	PG425G07FE00011243	PG425G07FE00011246
PG425G07FE00011248	PG425G07FE00011249	PG425G07FE00011250	PG425G07FE00011251
PG425G07FE00011253	PG425G07FE00011255	PG425G07FE00011256	PG425G07FE00011258
PG425G07FE00011260	PG425G07FE00011261	PG425G07FE00011263	PG425G07FE00011264
PG425G07FE00011268	PG425G07FE00011269	PG425G07FE00011270	PG425G07FE00011271
PG425G07FE00011272	PG425G07FE00011273	PG425G07FE00011274	PG425G07FE00011275
PG425G07FE00011276	PG425G07FE00011277	PG425G07FE00011278	PG425G07FE00011279
PG425G07FE00011281	PG425G07FE00011284	PG425G07FE00011285	PG425G07FE00011287
PG425G07FE00011288	PG425G07FE00011289	PG425G07FE00011290	PG425G07FE00011291
PG425G07FE00011293	PG425G07FE00011294	PG425G07FE00011295	PG425G07FE00011296
PG425G07FE00011297	PG425G07FE00011298	PG425G07FE00011300	PG425G07FE00011301
PG425G07FE00011303	PG425G07FE00011305	PG425G07FE00011306	PG425G07FE00011308
PG425G07FE00011309	PG425G07FE00011310	PG425G07FE00011311	PG425G07FE00011312
PG425G07FE00011313	PG425G07FE00011314	PG425G07FE00011315	PG425G07FE00011316
PG425G07FE00011319	PG425G07FE00011320	PG425G07FE00011321	PG425G07FE00011322
PG425G07FE00011324	PG425G07FE00011325	PG425G07FE00011326	PG425G07FE00011327
PG425G07FE00011328	PG425G07FE00011329	PG425G07FE00011330	PG425G07FE00011331
PG425G07FE00011332	PG425G07FE00011333	PG425G07FE00011334	PG425G07FE00011335
PG425G07FE00011338	PG425G07FE00011339	PG425G07FE00011340	PG425G07FE00011341
PG425G07FE00011342	PG425G07FE00011343	PG425G07FE00011344	PG425G07FE00011345
PG425G07FE00011346	PG425G07FE00011347	PG425G07FE00011348	PG425G07FE00011350
PG425G07FE00011351	PG425G07FE00011352	PG425G07FE00011355	PG425G07FE00011357
PG425G07FE00011358	PG425G07FE00011384	PG425G07FE00011385	PG425G07FE00011387
PG425G07FE00011389	PG425G07FE00011391	PG425G07FE00011392	PG425G07FE00011394
PG425G07FE00011395	PG425G07FE00011396	PG425G07FE00011399	PG425G07FE00011400
PG425G07FE00011404	PG425G07FE00011407	PG425G07FE00011411	PG425G07FE00011413
PG425G07FE00011414	PG425G07FE00011415	PG425G07FE00011416	PG425G07FE00011417
PG425G07FE00011420	PG425G07FE00011423	PG425G07FE00011424	PG425G07FE00011425
PG425G07FE00011426	PG425G07FE00011428	PG425G07FE00011430	PG425G07FE00011431
PG425G07FE00011436	PG425G07FE00011439	PG425G07FE00011441	PG425G07FE00011443
PG425G07FE00011448	PG425G07FE00011450	PG425G07FE00011451	PG425G07FE00011452
PG425G07FE00011456	PG425G07FE00011457	PG425G07FE00011460	PG425G07FE00011462
PG425G07FE00011464	PG425G07FE00011465	PG425G07FE00011466	PG425G07FE00011467
PG425G07FE00011468	PG425G07FE00011469	PG425G07FE00011470	PG425G07FE00011471
PG425G07FE00011472	PG425G07FE00011473	PG425G07FE00011474	PG425G07FE00011477
PG425G07FE00011479	PG425G07FE00011481	PG425G07FE00011485	PG425G07FE00011486
PG425G07FE00011488	PG425G07FE00011489	PG425G07FE00011492	PG425G07FE00011493

PG425G07FE00011495	PG425G07FE00011497	PG425G07FE00011499	PG425G07FE00011500
PG425G07FE00011502	PG425G07FE00011503	PG425G07FE00011504	PG425G07FE00011505
PG425G07FE00011507	PG425G07FE00011509	PG425G07FE00011510	PG425G07FE00011511
PG425G07FE00011513	PG425G07FE00011514	PG425G07FE00011515	PG425G07FE00011517
PG425G07FE00011519	PG425G07FE00011520	PG425G07FE00011521	PG425G07FE00011522
PG425G07FE00011523	PG425G07FE00011524	PG425G07FE00011525	PG425G07FE00011527
PG425G07FE00011529	PG425G07FE00011531	PG425G07FE00011533	PG425G07FE00011534
PG425G07FE00011539	PG425G07FE00011557	PG425G07FE00011558	PG425G07FE00011560
PG425G07FE00011561	PG425G07FE00011563	PG425G07FE00011567	PG425G07FE00011568
PG425G07FE00011571	PG425G07FE00011574	PG425G07FE00011575	PG425G07FE00011577
PG425G07FE00011578	PG425G07FE00011579	PG425G07FE00011580	PG425G07FE00011582
PG425G07FE00011583	PG425G07FE00011584	PG425G07FE00011587	PG425G07FE00011588
PG425G07FE00011589	PG425G07FE00011590	PG425G07FE00011591	PG425G07FE00011592
PG425G07FE00011596	PG425G07FE00011600	PG425G07FE00011602	PG425G07FE00011603
PG425G07FE00011605	PG425G07FE00011606	PG425G07FE00011607	PG425G07FE00011609
PG425G07FE00011610	PG425G07FE00011612	PG425G07FE00011615	PG425G07FE00011616
PG425G07FE00011617	PG425G07FE00011621	PG425G07FE00011623	PG425G07FE00011625
PG425G07FE00011629	PG425G07FE00011630	PG425G07FE00011631	PG425G07FE00011632
PG425G07FE00011634	PG425G07FE00011636	PG425G07FE00011637	PG425G07FE00011638
PG425G07FE00011639	PG425G07FE00011640	PG425G07FE00011641	PG425G07FE00011643
PG425G07FE00011644	PG425G07FE00011645	PG425G07FE00011646	PG425G07FE00011647
PG425G07FE00011648	PG425G07FE00011649	PG425G07FE00011650	PG425G07FE00011652
PG425G07FE00011653	PG425G07FE00011654	PG425G07FE00011655	PG425G07FE00011657
PG425G07FE00011658	PG425G07FE00011660	PG425G07FE00011662	PG425G07FE00011663
PG425G07FE00011664	PG425G07FE00011665	PG425G07FE00011666	PG425G07FE00014286
PG425G07FE00014287	PG425G07FE00014288	PG425G07FE00014289	PG425G07FE00014290
PG425G07FE00014291	PG425G07FE00014292	PG425G07FE00014293	PG425G07FE00014294
PG425G07FE00014295	PG425G07FE00014297	PG425G07FE00014298	PG425G07FE00014301
PG425G07FE00014302	PG425G07FE00014303	PG425G07FE00014304	PG425G07FE00014305
PG425G07FE00014306	PG425G07FE00014307	PG425G07FE00014308	PG425G07FE00014309
PG425G07FE00014310	PG425G07FE00014312	PG425G07FE00014313	PG425G07FE00014314
PG425G07FE00014315	PG425G07FE00014316	PG425G07FE00014317	PG425G07FE00014318
PG425G07FE00014319	PG425G07FE00014320	PG425G07FE00014321	PG425G07FE00014322
PG425G07FE00014323	PG425G07FE00014324	PG425G07FE00014325	PG425G07FE00014326
PG425G07FE00014327	PG425G07FE00014328	PG425G07FE00014329	PG425G07FE00014330
PG425G07FE00014331	PG425G07FE00014332	PG425G07FE00014333	PG425G07FE00014334
PG425G07FE00014336	PG425G07FE00014337	PG425G07FE00014338	PG425G07FE00014339

PG425G07FE00014340	PG425G07FE00014341	PG425G07FE00014342	PG425G07FE00014343
PG425G07FE00014344	PG425G07FE00014346	PG425G07FE00014349	PG425G07FE00014350
PG425G07FE00014351	PG425G07FE00014352	PG425G07FE00014353	PG425G07FE00014354
PG425G07FE00014356	PG425G07FE00014357	PG425G07FE00014358	PG425G07FE00014359
PG425G07FE00014360	PG425G07FE00014362	PG425G07FE00014363	PG425G07FE00014364
PG425G07FE00014366	PG425G07FE00014368	PG425G07FE00014369	PG425G07FE00014370
PG425G07FE00014371	PG425G07FE00014372	PG425G07FE00014373	PG425G07FE00014375
PG425G07FE00014376	PG425G07FE00014377	PG425G07FE00014379	PG425G07FE00014380
PG425G07FE00014381	PG425G07FE00014382	PG425G07FE00014383	PG425G07FE00014384
PG425G07FE00014385	PG425G07FE00014386	PG425G07FE00014387	PG425G07FE00014388
PG425G07FE00014389	PG425G07FE00014390	PG425G07FE00014391	PG425G07FE00014392
PG425G07FE00014393	PG425G07FE00014394	PG425G07FE00014395	PG425G07FE00014397
PG425G07FE00014398	PG425G07FE00014399	PG425G07FE00014400	PG425G07FE00014401
PG425G07FE00014402	PG425G07FE00014404	PG425G07FE00014405	PG425G07FE00014407
PG425G07FE00014408	PG425G07FE00014409	PG425G07FE00014410	PG425G07FE00014411
PG425G07FE00014412	PG425G07FE00014413	PG425G07FE00014414	PG425G07FE00014415
PG425G07FE00014416	PG425G07FE00014417	PG425G07FE00014418	PG425G07FE00014419
PG425G07FE00014420	PG425G07FE00014421	PG425G07FE00014422	PG425G07FE00014424
PG425G07FE00014425	PG425G07FE00014426	PG425G07FE00014427	PG425G07FE00014428
PG425G07FE00014429	PG425G07FE00014430	PG425G07FE00014431	PG425G07FE00014432
PG425G07FE00014433	PG425G07FE00014434	PG425G07FE00014435	PG425G07FE00014436
PG425G07FE00014438	PG425G07FE00014440	PG425G07FE00014441	PG425G07FE00014442
PG425G07FE00014443	PG425G07FE00014445	PG425G07FE00014446	PG425G07FE00014447
PG425G07FE00014448	PG425G07FE00014450	PG425G07FE00014451	PG425G07FE00014453
PG425G07FE00014455	PG425G07FE00014456	PG425G07FE00014457	PG425G07FE00014458
PG425G07FE00014459	PG425G07FE00014460	PG425G07FE00014461	PG425G07FE00014463
PG425G07FE00014464	PG425G07FE00014467	PG425G07FE00014469	PG425G07FE00014470
PG425G07FE00014471	PG425G07FE00014472	PG425G07FE00014473	PG425G07FE00014474
PG425G07FE00014475	PG425G07FE00014477	PG425G07FE00014479	PG425G07FE00014480
PG425G07FE00014481	PG425G07FE00014483	PG425G07FE00014484	PG425G07FE00014485
PG425G07FE00014487	PG425G07FE00014489	PG425G07FE00014491	PG425G07FE00014492
PG425G07FE00014493	PG425G07FE00014494	PG425G07FE00014495	PG425G07FE00014496
PG425G07FE00014497	PG425G07FE00014498	PG425G07FE00014499	PG425G07FE00014500
PG425G07FE00014501	PG425G07FE00014502	PG425G07FE00014503	PG425G07FE00014504
PG425G07FE00014505	PG425G07FE00014506	PG425G07FE00014508	PG425G07FE00014509
PG425G07FE00014511	PG425G07FE00014513	PG425G07FE00014516	PG425G07FE00014517
PG425G07FE00014518	PG425G07FE00014520	PG425G07FE00014521	PG425G07FE00014522

PG425G07FE00014523	PG425G07FE00014524	PG425G07FE00014525	PG425G07FE00014526
PG425G07FE00014529	PG425G07FE00014530	PG425G07FE00014531	PG425G07FE00014532
PG425G07FE00014533	PG425G07FE00014535	PG425G07FE00014536	PG425G07FE00014542
PG425G07FE00014543	PG425G07FE00014545	PG425G07FE00014546	PG425G07FE00014547
PG425G07FE00014550	PG425G07FE00014551	PG425G07FE00014554	PG425G07FE00014556
PG425G07FE00014557	PG425G07FE00014558	PG425G07FE00014560	PG425G07FE00014561
PG425G07FE00014563	PG425G07FE00014564	PG425G07FE00014565	PG425G07FE00014566
PG425G07FE00014567	PG425G07FE00014568	PG425G07FE00014569	PG425G07FE00014572
PG425G07FE00014574	PG425G07FE00014575	PG425G07FE00014576	PG425G07FE00014577
PG425G07FE00014578	PG425G07FE00014580	PG425G07FE00014582	PG425G07FE00014583
PG425G07FE00014584	PG425G07FE00014585	PG425G07FE00014586	PG425G07FE00014588
PG425G07FE00014589	PG425G07FE00014590	PG425G07FE00014591	PG425G07FE00014592
PG425G07FE00014594	PG425G07FE00014595	PG425G07FE00014596	PG425G07FE00014597
PG425G07FE00014598	PG425G07FE00014600	PG425G07FE00014601	PG425G07FE00014603
PG425G07FE00014604	PG425G07FE00014605	PG425G07FE00014607	PG425G07FE00014608
PG425G07FE00014610	PG425G07FE00014611	PG425G07FE00014613	PG425G07FE00014614
PG425G07FE00014617	PG425G07FE00014619	PG425G07FE00014621	PG425G07FE00014622
PG425G07FE00014625	PG425G07FE00014627	PG425G07FE00014628	PG425G07FE00014629
PG425G07FE00014631	PG425G07FE00014632	PG425G07FE00014633	PG425G07FE00014635
PG425G07FE00014637	PG425G07FE00014639	PG425G07FE00014640	PG425G07FE00014641
PG425G07FE00014643	PG425G07FE00014645	PG425G07FE00014646	PG425G07FE00014647
PG425G07FE00014648	PG425G07FE00014649	PG425G07FE00014651	PG425G07FE00014652
PG425G07FE00014653	PG425G07FE00014654	PG425G07FE00014655	PG425G07FE00014657
PG425G07FE00014661	PG425G07FE00014662	PG425G07FE00014664	PG425G07FE00014665
PG425G07FE00014670	PG425G07FE00014671	PG425G07FE00014672	PG425G07FE00014675
PG425G07FE00014676	PG425G07FE00014677	PG425G07FE00014678	PG425G07FE00014684
PG425G07FE00014685	PG425G07FE00014686	PG425G07FE00016225	PG425G07FE00016230
PG425G07FE00016232	PG425G07FE00016234	PG425G07FE00016235	PG425G07FE00016238
PG425G07FE00016247	PG425G07FE00016251	PG425G07FE00016253	PG425G07FE00016254
PG425G07FE00016255	PG425G07FE00016256	PG425G07FE00016259	PG425G07FE00016261
PG425G07FE00016262	PG425G07FE00016265	PG425G07FE00016267	PG425G07FE00016269
PG425G07FE00016270	PG425G07FE00016276	PG425G07FE00016279	PG425G07FE00016283
PG425G07FE00016291	PG425G07FE00016294	PG425G07FE00016303	PG425G07FE00016305
PG425G07FE00016310	PG425G07FE00016312	PG425G07FE00016314	PG425G07FE00016317
PG425G07FE00016318	PG425G07FE00016320	PG425G07FE00016322	PG425G07FE00016328
PG425G07FE00016335	PG425G07FE00016339	PG425G07FE00016341	PG425G07FE00016343
PG425G07FE00016344	PG425G07FE00016352	PG425G07FE00016353	PG425G07FE00016354

PG425G07FE00016355	PG425G07FE00016357	PG425G07FE00016360	PG425G07FE00016361
PG425G07FE00016362	PG425G07FE00016363	PG425G07FE00016364	PG425G07FE00016365
PG425G07FE00016366	PG425G07FE00016369	PG425G07FE00016370	PG425G07FE00016371
PG425G07FE00016372	PG425G07FE00016373	PG425G07FE00016374	PG425G07FE00016375
PG425G07FE00016376	PG425G07FE00016377	PG425G07FE00016378	PG425G07FE00016380
PG425G07FE00016381	PG425G07FE00016382	PG425G07FE00016383	PG425G07FE00016384
PG425G07FE00016386	PG425G07FE00016387	PG425G07FE00016389	PG425G07FE00016390
PG425G07FE00016391	PG425G07FE00016392	PG425G07FE00016393	PG425G07FE00016394
PG425G07FE00016395	PG425G07FE00016396	PG425G07FE00016400	PG425G07FE00016401
PG425G07FE00016402	PG425G07FE00016403	PG425G07FE00016404	PG425G07FE00016406
PG425G07FE00016407	PG425G07FE00016408	PG425G07FE00016409	PG425G07FE00016410
PG425G07FE00016411	PG425G07FE00016412	PG425G07FE00016413	PG425G07FE00016414
PG425G07FE00016415	PG425G07FE00016417	PG425G07FE00016418	PG425G07FE00016419
PG425G07FE00016420	PG425G07FE00016421	PG425G07FE00016423	PG425G07FE00016424
PG425G07FE00016425	PG425G07FE00016427	PG425G07FE00016428	PG425G07FE00016429
PG425G07FE00016430	PG425G07FE00016431	PG425G07FE00016433	PG425G07FE00016434
PG425G07FE00016436	PG425G07FE00016438	PG425G07FE00016439	PG425G07FE00016440
PG425G07FE00016441	PG425G07FE00016442	PG425G07FE00016444	PG425G07FE00016445
PG425G07FE00016447	PG425G07FE00016448	PG425G07FE00016449	PG425G07FE00016451
PG425G07FE00016452	PG425G07FE00016453	PG425G07FE00016454	PG425G07FE00016455
PG425G07FE00016458	PG425G07FE00016460	PG425G07FE00016461	PG425G07FE00016463
PG425G07FE00016464	PG425G07FE00016465	PG425G07FE00016467	PG425G07FE00016468
PG425G07FE00016469	PG425G07FE00016470	PG425G07FE00016471	PG425G07FE00016472
PG425G07FE00016474	PG425G07FE00016475	PG425G07FE00016476	PG425G07FE00016477
PG425G07FE00016478	PG425G07FE00016479	PG425G07FE00016480	PG425G07FE00016481
PG425G07FE00016482	PG425G07FE00016483	PG425G07FE00016484	PG425G07FE00016486
PG425G07FE00016487	PG425G07FE00016493	PG425G07FE00016494	PG425G07FE00016495
PG425G07FE00016497	PG425G07FE00016498	PG425G07FE00016500	PG425G07FE00016501
PG425G07FE00016504	PG425G07FE00016505	PG425G07FE00016507	PG425G07FE00016509
PG425G07FE00016510	PG425G07FE00016511	PG425G07FE00016512	PG425G07FE00016513
PG425G07FE00016514	PG425G07FE00016515	PG425G07FE00016517	PG425G07FE00016519
PG425G07FE00016520	PG425G07FE00016522	PG425G07FE00016525	PG425G07FE00016526
PG425G07FE00016527	PG425G07FE00016528	PG425G07FE00016529	PG425G07FE00016530
PG425G07FE00016531	PG425G07FE00016532	PG425G07FE00016533	PG425G07FE00016534
PG425G07FE00016535	PG425G07FE00016536	PG425G07FE00016537	PG425G07FE00016538
PG425G07FE00016539	PG425G07FE00016541	PG425G07FE00016542	PG425G07FE00016545
PG425G07FE00016546	PG425G07FE00016547	PG425G07FE00016548	PG425G07FE00016549

PG425G07FE00016550	PG425G07FE00016551	PG425G07FE00016552	PG425G07FE00016553
PG425G07FE00016554	PG425G07FE00016557	PG425G07FE00016559	PG425G07FE00016560
PG425G07FE00016562	PG425G07FE00016565	PG425G07FE00016566	PG425G07FE00016567
PG425G07FE00016568	PG425G07FE00016569	PG425G07FE00016570	PG425G07FE00016571
PG425G07FE00016572	PG425G07FE00016574	PG425G07FE00016575	PG425G07FE00016576
PG425G07FE00016577	PG425G07FE00016578	PG425G07FE00016579	PG425G07FE00016580
PG425G07FE00016581	PG425G07FE00016582	PG425G07FE00016585	PG425G07FE00016587
PG425G07FE00016588	PG425G07FE00016589	PG425G07FE00016591	PG425G07FE00016592
PG425G07FE00016593	PG425G07FE00016594	PG425G07FE00016596	PG425G07FE00016599
PG425G07FE00016600	PG425G07FE00016602	PG425G07FE00016603	PG425G07FE00016604
PG425G07FE00016605	PG425G07FE00016606	PG425G07FE00016607	PG425G07FE00016610
PG425G07FE00016611	PG425G07FE00016612	PG425G07FE00016613	PG425G07FE00016615
PG425G07FE00016616	PG425G07FE00016617	PG425G07FE00016618	PG425G07FE00016619
PG425G07FE00016620	PG425G07FE00016622	PG425G07FE00016623	PG425G07FE00016625
PG425G07FE00016626	PG425G07FE00016628	PG425G07FE00016629	PG425G07FE00016630
PG425G07FE00016632	PG425G07FE00016633	PG425G07FE00016635	PG425G07FE00016636
PG425G07FE00016639	PG425G07FE00016643	PG425G07FE00016644	PG425G07FE00016645
PG425G07FE00016646	PG425G07FE00016647	PG425G07FE00016648	PG425G07FE00016650
PG425G07FE00016651	PG425G07FE00016652	PG425G07FE00016653	PG425G07FE00016654
PG425G07FE00016655	PG425G07FE00016657	PG425G07FE00016659	PG425G07FE00016663
PG425G07FE00016664	PG425G07FE00016665	PG425G07FE00016666	PG425G07FE00016667
PG425G07FE00016668	PG425G07FE00016669	PG425G07FE00016671	PG425G07FE00016673
PG425G07FE00016674	PG425G07FE00016675	PG425G07FE00016676	PG425G07FE00016678
PG425G07FE00016679	PG425G07FE00016681	PG425G07FE00016683	PG425G07FE00016685
PG425G07FE00016688	PG425G07FE00016689	PG425G07FE00016691	PG425G07FE00016693
PG425G07FE00016694	PG425G07FE00016695	PG425G07FE00016697	PG425G07FE00016700
PG425G07FE00016701	PG425G07FE00016702	PG425G07FE00016703	PG425G07FE00016706
PG425G07FE00016708	PG425G07FE00016709	PG425G07FE00016711	PG425G07FE00016712
PG425G07FE00016713	PG425G07FE00016714	PG425G07FE00016717	PG425G07FE00016718
PG425G07FE00016720	PG425G07FE00016721	PG425G07FE00016722	PG425G07FE00016723
PG425G07FE00016725	PG425G07FE00016726	PG425G07FE00016727	PG425G07FE00016728
PG425G07FE00016730	PG425G07FE00016734	PG425G07FE00016736	PG425G07FE00016737
PG425G07FE00016738	PG425G07FE00016741	PG425G07FE00016742	PG425G07FE00016744
PG425G07FE00016745	PG425G07FE00016747	PG425G07FE00016748	PG425G07FE00016749
PG425G07FE00016750	PG425G07FE00016751	PG425G07FE00016752	PG425G07FE00016753
PG425G07FE00016754	PG425G07FE00016755	PG425G07FE00016756	PG425G07FE00016757
PG425G07FE00016758	PG425G07FE00016759	PG425G07FE00016760	PG425G07FE00016761

PG425G07FE00016763	PG425G07FE00016764	PG425G07FE00016765	PG425G07FE00016768
PG425G07FE00016769	PG425G07FE00016770	PG425G07FE00016771	PG425G07FE00016772
PG425G07FE00016774	PG425G07FE00016775	PG425G07FE00016776	PG425G07FE00016777
PG425G07FE00016779	PG425G07FE00016781	PG425G07FE00016783	PG425G07FE00016784
PG425G07FE00016787	PG425G07FE00016788	PG425G07FE00016789	PG425G07FE00016790
PG425G07FE00016791	PG425G07FE00016792	PG425G07FE00016793	PG425G07FE00016794
PG425G07FE00016795	PG425G07FE00016796	PG425G07FE00016800	PG425G07FE00016802
PG425G07FE00016804	PG425G07FE00016805	PG426G07FE00001139	PG426G07FE00001145
PG426G07FE00001149	PG426G07FE00001151	PG426G07FE00001152	PG426G07FE00001154
PG426G07FE00001159	PG426G07FE00001161	PG426G07FE00001163	PG426G07FE00001165
PG426G07FE00001166	PG426G07FE00001172	PG426G07FE00001175	PG426G07FE00001176
PG426G07FE00001182	PG426G07FE00001183	PG426G07FE00001193	PG426G07FE00001204
PG426G07FE00001212	PG426G07FE00001216	PG426G07FE00001222	PG426G07FE00001228
PG426G07FE00001232	PG426G07FE00001235	PG426G07FE00001241	PG426G07FE00001248
PG426G07FE00001296	PG426G07FE00001299	PG426G07FE00001301	PG426G07FE00001306
PG426G07FE00001308	PG426G07FE00001309	PG426G07FE00001310	PG426G07FE00001312
PG426G07FE00001313	PG426G07FE00001315	PG426G07FE00001316	PG426G07FE00001317
PG426G07FE00001318	PG426G07FE00001319	PG426G07FE00001320	PG426G07FE00001322
PG426G07FE00001323	PG426G07FE00001324	PG426G07FE00001325	PG426G07FE00001327
PG426G07FE00001330	PG426G07FE00001332	PG426G07FE00001334	PG426G07FE00001339
PG426G07FE00001347	PG426G07FE00003346	PG426G07FE00003378	PG426G07FE00003380
PG426G07FE00003392	PG426G07FE00003395	PG426G07FE00003400	PG426G07FE00003418
PG426G07FE00003428	PG426G07FE00003431	PG426G07FE00003433	PG426G07FE00003440
PG426G07FE00003489	PG426G07FE00003506	PG442G07FE00009284	PG442G07FE00009286
PG442G07FE00009308	PG442G07FE00009312	PG442G07FE00009313	PG442G07FE00009316
PG442G07FE00009326	PG442G07FE00009327	PG442G07FE00009369	PG442G07FE00009383
PG442G07FE00009410	PG442G07FE00009426	PG442G07FE00009427	PG442G07FE00009437
PG442G07FE00009443	PG442G07FE00009467	PG442G07FE00009477	PG442G07FE00009489
PG442G07FE00009493	PG442G07FE00009494	PG442G07FE00009495	PG442G07FE00009498
PG442G07FE00009500	PG442G07FE00009501	PG442G07FE00009503	PG442G07FE00009504
PG442G07FE00009505	PG442G07FE00009508	PG442G07FE00009509	PG442G07FE00009510
PG442G07FE00009511	PG442G07FE00009515	PG442G07FE00009524	PG442G07FE00009526
PG442G07FE00009527	PG442G07FE00009530	PG442G07FE00009531	PG442G07FE00009532
PG442G07FE00009533	PG442G07FE00009536	PG442G07FE00009537	PG442G07FE00009538
PG442G07FE00009539	PG442G07FE00009540	PG442G07FE00009541	PG442G07FE00009543
PG442G07FE00009544	PG442G07FE00009545	PG442G07FE00009546	PG442G07FE00009552
PG442G07FE00009557	PG442G07FE00009559	PG442G07FE00009564	PG442G07FE00009566

PG442G07FE00009567	PG442G07FE00009570	PG442G07FE00009574	PG442G07FE00009577
PG442G07FE00009581	PG442G07FE00009583	PG442G07FE00009597	PG442G07FE00009610
PG442G07FE00009613	PG442G07FE00009618	PG442G07FE00009619	PG442G07FE00009623
PG442G07FE00009632	PG442G07FE00009637	PG442G07FE00009639	PG442G07FE00009640
PG442G07FE00009652	PG442G07FE00009679	PG442G07FE00009681	PG442G07FE00009684
PG442G07FE00009685	PG442G07FE00009687	PG442G07FE00009689	PG442G07FE00009690
PG442G07FE00009692	PG442G07FE00009694	PG442G07FE00009695	PG442G07FE00009696
PG442G07FE00009699	PG442G07FE00009700	PG442G07FE00009701	PG442G07FE00009702
PG442G07FE00009704	PG442G07FE00009705	PG442G07FE00009707	PG442G07FE00009708
PG442G07FE00009710	PG442G07FE00009717	PG442G07FE00009718	PG442G07FE00009720
PG442G07FE00009722	PG442G07FE00009724	PG442G07FE00009725	PG442G07FE00009726
PG442G07FE00009727	PG442G07FE00009728	PG442G07FE00009729	PG442G07FE00009730
PG442G07FE00009732	PG442G07FE00009733	PG442G07FE00009736	PG442G07FE00009737
PG442G07FE00009738	PG442G07FE00009739	PG442G07FE00009741	PG442G07FE00009742
PG442G07FE00009743	PG442G07FE00009744	PG442G07FE00009745	PG442G07FE00009746
PG442G07FE00009747	PG442G07FE00009751	PG442G07FE00009752	PG442G07FE00009753
PG442G07FE00009754	PG442G07FE00009755	PG442G07FE00009756	PG442G07FE00009757
PG442G07FE00009758	PG442G07FE00009761	PG442G07FE00009764	PG442G07FE00009769
PG442G07FE00009771	PG442G07FE00009774	PG442G07FE00009776	PG442G07FE00009777
PG442G07FE00009781	PG442G07FE00009784	PG442G07FE00009785	PG442G07FE00009786
PG442G07FE00009792	PG442G07FE00009793	PG442G07FE00009800	PG442G07FE00009802
PG442G07FE00009820	PG442G07FE00009822	PG442G07FE00009823	PG442G07FE00009824
PG442G07FE00009826	PG442G07FE00009828	PG442G07FE00009829	PG442G07FE00009834
PG442G07FE00009837	PG442G07FE00009852	PG442G07FE00009853	PG442G07FE00009856
PG442G07FE00009857	PG442G07FE00009858	PG442G07FE00009872	PG442G07FE00009873
PG442G07FE00009875	PG442G07FE00009876	PG442G07FE00009877	PG442G07FE00009878
PG442G07FE00009879	PG442G07FE00009880	PG442G07FE00009883	PG442G07FE00009884
PG442G07FE00009885	PG442G07FE00009886	PG442G07FE00009887	PG442G07FE00009889
PG442G07FE00009892	PG442G07FE00009893	PG442G07FE00009894	PG442G07FE00009895
PG442G07FE00009897	PG442G07FE00009898	PG442G07FE00009900	PG442G07FE00009901
PG442G07FE00009903	PG442G07FE00009904	PG442G07FE00009908	PG442G07FE00009909
PG442G07FE00009910	PG442G07FE00009911	PG442G07FE00009912	PG442G07FE00009913
PG442G07FE00009917	PG442G07FE00009920	PG442G07FE00009921	PG442G07FE00009924
PG442G07FE00009932	PG442G07FE00009933	PG442G07FE00009937	PG442G07FE00009938
PG442G07FE00009941	PG442G07FE00009943	PG442G07FE00009944	PG442G07FE00009946
PG442G07FE00009947	PG442G07FE00009986	PG442G07FE00009998	PG442G07FE00010001
PG442G07FE00010008	PG442G07FE00010012	PG442G07FE00010030	PG442G07FE00010044

PG442G07FE00010067	PG442G07FE00010087	PG442G07FE00010088	PG442G07FE00010095
PG442G07FE00010098	PG442G07FE00010100	PG442G07FE00010103	PG442G07FE00010108
PG442G07FE00010113	PG442G07FE00010114	PG442G07FE00010135	PG442G07FE00010136
PG442G07FE00010137	PG442G07FE00010142	PG442G07FE00010145	PG442G07FE00010150
PG442G07FE00010155	PG442G07FE00010158	PG442G07FE00010159	PG442G07FE00010169
PG442G07FE00010177	PG442G07FE00010184	PG442G07FE00010194	PG442G07FE00010226
PG442G07FE00010227	PG442G07FE00010229	PG442G07FE00010233	PG442G07FE00010234
PG442G07FE00010236	PG442G07FE00010241	PG442G07FE00010243	PG442G07FE00010251
PG442G07FE00010254	PG442G07FE00010255	PG442G07FE00010257	PG442G07FE00010260
PG442G07FE00010262	PG442G07FE00010268	PG442G07FE00010273	PG442G07FE00010275
PG442G07FE00010276	PG442G07FE00010279	PG442G07FE00010283	PG442G07FE00010291
PG442G07FE00010293	PG442G07FE00010308	PG442G07FE00010309	PG442G07FE00010310
PG442G07FE00010312	PG442G07FE00010313	PG442G07FE00010314	PG442G07FE00010315
PG442G07FE00010316	PG442G07FE00010317	PG442G07FE00010318	PG442G07FE00010319
PG442G07FE00010320	PG442G07FE00010321	PG442G07FE00010322	PG442G07FE00010323
PG442G07FE00010326	PG442G07FE00010328	PG442G07FE00010334	PG442G07FE00010335
PG442G07FE00010336	PG442G07FE00010356	PG442G07FE00010357	PG442G07FE00010358
PG442G07FE00010359	PG442G07FE00010360	PG442G07FE00010361	PG442G07FE00010362
PG442G07FE00010363	PG442G07FE00010364	PG442G07FE00010365	PG442G07FE00010366
PG442G07FE00010367	PG442G07FE00010368	PG442G07FE00010369	PG442G07FE00010370
PG442G07FE00010371	PG442G07FE00010372	PG442G07FE00010374	PG442G07FE00010377
PG442G07FE00010378	PG442G07FE00010379	PG442G07FE00010383	PG442G07FE00010388
PG442G07FE00010390	PG442G07FE00010393	PG442G07FE00010396	PG442G07FE00010397
PG442G07FE00010398	PG442G07FE00010401	PG442G07FE00010402	PG442G07FE00010404
PG442G07FE00010406	PG442G07FE00010407	PG442G07FE00010410	PG442G07FE00010413
PG442G07FE00010417	PG442G07FE00010420	PG442G07FE00010423	PG442G07FE00010425
PG442G07FE00010426	PG442G07FE00010427	PG442G07FE00010428	PG442G07FE00010429
PG442G07FE00010430	PG442G07FE00010431	PG442G07FE00010433	PG442G07FE00010436
PG442G07FE00010455	PG442G07FE00010457	PG442G07FE00010463	PG442G07FE00010466
PG442G07FE00010470	PG442G07FE00010478	PG442G07FE00010484	PG442G07FE00010486
PG442G07FE00010487	PG442G07FE00010492	PG442G07FE00010493	PG442G07FE00010494
PG442G07FE00010498	PG442G07FE00010499	PG442G07FE00010500	PG442G07FE00010501
PG442G07FE00010509	PG442G07FE00010510	PG442G07FE00010511	PG442G07FE00010513
PG442G07FE00010514	PG442G07FE00010515	PG442G07FE00010516	PG442G07FE00010517
PG442G07FE00010518	PG442G07FE00010520	PG442G07FE00010521	PG442G07FE00010522
PG442G07FE00010523	PG442G07FE00010524	PG442G07FE00010526	PG442G07FE00010527
PG442G07FE00010537	PG442G07FE00010538	PG442G07FE00010539	PG442G07FE00010540

PG442G07FE00010541	PG442G07FE00010542	PG442G07FE00010543	PG442G07FE00010544
PG442G07FE00010546	PG442G07FE00010547	PG442G07FE00010548	PG442G07FE00010549
PG442G07FE00010550	PG442G07FE00010551	PG442G07FE00010552	PG442G07FE00010553
PG442G07FE00010554	PG442G07FE00010557	PG442G07FE00010558	PG442G07FE00010559
PG442G07FE00010560	PG442G07FE00010563	PG442G07FE00010564	PG442G07FE00010565
PG442G07FE00010566	PG442G07FE00010567	PG442G07FE00010568	PG442G07FE00010570
PG442G07FE00010571	PG442G07FE00010574	PG442G07FE00010575	PG442G07FE00010579
PG442G07FE00010580	PG442G07FE00010582	PG442G07FE00010586	PG442G07FE00010587
PG442G07FE00010588	PG442G07FE00010590	PG442G07FE00010592	PG442G07FE00010593
PG442G07FE00010594	PG442G07FE00010595	PG442G07FE00010596	PG442G07FE00010598
PG442G07FE00010599	PG442G07FE00010600	PG442G07FE00010601	PG442G07FE00010602
PG442G07FE00010603	PG442G07FE00010604	PG442G07FE00010605	PG442G07FE00010607
PG442G07FE00010611	PG442G07FE00010612	PG442G07FE00010614	PG442G07FE00010615
PG442G07FE00010619	PG442G07FE00010621	PG442G07FE00010627	PG442G07FE00010629
PG442G07FE00010631	PG442G07FE00010632	PG442G07FE00010638	PG442G07FE00010639
PG442G07FE00010640	PG442G07FE00010641	PG442G07FE00010645	PG442G07FE00010646
PG442G07FE00010653	PG442G07FE00010654	PG442G07FE00010655	PG442G07FE00010656
PG442G07FE00010657	PG442G07FE00010658	PG442G07FE00010659	PG442G07FE00010661
PG442G07FE00010662	PG442G07FE00010664	PG442G07FE00010666	PG442G07FE00010667
PG442G07FE00010668	PG442G07FE00010669	PG442G07FE00010670	PG442G07FE00010671
PG442G07FE00010672	PG442G07FE00010673	PG442G07FE00010674	PG442G07FE00010675
PG442G07FE00010676	PG442G07FE00010677	PG442G07FE00010678	PG442G07FE00010679
PG442G07FE00010680	PG442G07FE00010681	PG442G07FE00010682	PG442G07FE00010683
PG442G07FE00010684	PG442G07FE00010685	PG442G07FE00010686	PG442G07FE00010687
PG442G07FE00010688	PG442G07FE00010689	PG442G07FE00010690	PG442G07FE00010691
PG442G07FE00010693	PG442G07FE00010694	PG442G07FE00010695	PG442G07FE00010697
PG442G07FE00010698	PG442G07FE00010699	PG442G07FE00010701	PG442G07FE00010702
PG442G07FE00010703	PG442G07FE00010704	PG442G07FE00010705	PG442G07FE00010706
PG442G07FE00010707	PG442G07FE00010709	PG442G07FE00010710	PG442G07FE00010711
PG442G07FE00010712	PG442G07FE00010713	PG442G07FE00010714	PG442G07FE00010715
PG442G07FE00010716	PG442G07FE00010717	PG442G07FE00010718	PG442G07FE00010719
PG442G07FE00010721	PG442G07FE00010722	PG442G07FE00010723	PG442G07FE00010724
PG442G07FE00010725	PG442G07FE00010726	PG442G07FE00010727	PG442G07FE00010728
PG442G07FE00010729	PG442G07FE00010730	PG442G07FE00010731	PG442G07FE00010732
PG442G07FE00010733	PG442G07FE00010734	PG442G07FE00010735	PG442G07FE00010736
PG442G07FE00010738	PG442G07FE00010739	PG442G07FE00010740	PG442G07FE00010741
PG442G07FE00010743	PG442G07FE00010744	PG442G07FE00010745	PG442G07FE00010746

PG442G07FE00010747	PG442G07FE00010748	PG442G07FE00010749	PG442G07FE00010750
PG442G07FE00010751	PG442G07FE00010752	PG442G07FE00010753	PG442G07FE00010754
PG442G07FE00010756	PG442G07FE00010757	PG442G07FE00010758	PG442G07FE00010759
PG442G07FE00010760	PG442G07FE00010761	PG442G07FE00010762	PG442G07FE00010763
PG442G07FE00010765	PG442G07FE00010769	PG442G07FE00010770	PG442G07FE00010771
PG442G07FE00010773	PG442G07FE00010774	PG442G07FE00010775	PG442G07FE00010776
PG442G07FE00010777	PG442G07FE00010779	PG442G07FE00010781	PG442G07FE00010782
PG442G07FE00010783	PG442G07FE00010784	PG442G07FE00010786	PG442G07FE00010788
PG442G07FE00010789	PG442G07FE00010791	PG442G07FE00010792	PG442G07FE00010795
PG442G07FE00010797	PG442G07FE00010799	PG442G07FE00010802	PG442G07FE00010804
PG442G07FE00010806	PG442G07FE00010807	PG442G07FE00010808	PG442G07FE00010809
PG442G07FE00010810	PG442G07FE00010821	PG442G07FE00010824	PG442G07FE00010826
PG442G07FE00010829	PG442G07FE00010830	PG442G07FE00010831	PG442G07FE00010832
PG442G07FE00010833	PG442G07FE00010834	PG442G07FE00010844	PG442G07FE00010847
PG442G07FE00010849	PG442G07FE00010850	PG442G07FE00010851	PG442G07FE00010852
PG442G07FE00010853	PG442G07FE00010854	PG442G07FE00010855	PG442G07FE00010856
PG442G07FE00010857	PG442G07FE00010858	PG442G07FE00010860	PG442G07FE00010862
PG442G07FE00010863	PG442G07FE00010864	PG442G07FE00010865	PG442G07FE00010867
PG442G07FE00010869	PG442G07FE00010875	PG442G07FE00010876	PG442G07FE00010878
PG442G07FE00010881	PG442G07FE00010882	PG442G07FE00010883	PG442G07FE00010884
PG442G07FE00010886	PG442G07FE00010887	PG442G07FE00010888	PG442G07FE00010889
PG442G07FE00010890	PG442G07FE00010891	PG442G07FE00010892	PG442G07FE00010896
PG442G07FE00010897	PG442G07FE00010898	PG442G07FE00010899	PG442G07FE00010901
PG442G07FE00010902	PG442G07FE00010903	PG442G07FE00010914	PG442G07FE00010916
PG442G07FE00010917	PG442G07FE00010949	PG442G07FE00011003	PG442G07FE00011005
PG442G07FE00011013	PG442G07FE00011038	PG442G07FE00011056	PG442G07FE00011058
PG442G07FE00011086	PG442G07FE00011101	PG442G07FE00011144	PG442G07FE00011205
PG442G07FE00011237	PG442G07FE00011238	PG442G07FE00011239	PG442G07FE00011240
PG442G07FE00011242	PG442G07FE00011243	PG442G07FE00011244	PG442G07FE00011245
PG442G07FE00011262	PG442G07FE00011264	PG442G07FE00011265	PG442G07FE00011267
PG442G07FE00011268	PG442G07FE00011269	PG442G07FE00011270	PG442G07FE00011272
PG442G07FE00011273	PG442G07FE00011274	PG442G07FE00011275	PG442G07FE00011276
PG442G07FE00011277	PG442G07FE00011278	PG442G07FE00011280	PG442G07FE00011281
PG442G07FE00011282	PG442G07FE00011283	PG442G07FE00011284	PG442G07FE00011285
PG442G07FE00011291	PG442G07FE00011297	PG442G07FE00011301	PG442G07FE00011304
PG442G07FE00011305	PG442G07FE00011306	PG442G07FE00011308	PG442G07FE00011311
PG442G07FE00011313	PG442G07FE00011317	PG442G07FE00011319	PG442G07FE00011320

PG442G07FE00011322	PG442G07FE00011323	PG442G07FE00011326	PG442G07FE00011327
PG442G07FE00011328	PG442G07FE00011329	PG442G07FE00011330	PG442G07FE00011375
PG442G07FE00011376	PG442G07FE00011377	PG442G07FE00011381	PG442G07FE00011385
PG442G07FE00011388	PG442G07FE00011389	PG442G07FE00011390	PG442G07FE00011394
PG442G07FE00011395	PG442G07FE00011396	PG442G07FE00011397	PG442G07FE00011399
PG442G07FE00011400	PG442G07FE00011402	PG442G07FE00011403	PG442G07FE00011404
PG442G07FE00011407	PG442G07FE00011411	PG442G07FE00011413	PG442G07FE00011416
PG442G07FE00011417	PG442G07FE00011418	PG442G07FE00011419	PG442G07FE00011420
PG442G07FE00011421	PG442G07FE00011422	PG442G07FE00011423	PG442G07FE00011424
PG442G07FE00011425	PG442G07FE00011426	PG442G07FE00011427	PG442G07FE00011428
PG442G07FE00011429	PG442G07FE00011430	PG442G07FE00011431	PG442G07FE00011448
PG442G07FE00011449	PG442G07FE00011450	PG442G07FE00011451	PG442G07FE00011452
PG442G07FE00011453	PG442G07FE00011454	PG442G07FE00011455	PG442G07FE00011456
PG442G07FE00011457	PG442G07FE00011458	PG442G07FE00011459	PG442G07FE00011468
PG442G07FE00011470	PG442G07FE00011473	PG442G07FE00011474	PG442G07FE00011475
PG442G07FE00011477	PG442G07FE00011478	PG442G07FE00011479	PG442G07FE00011481
PG442G07FE00011482	PG442G07FE00011483	PG442G07FE00011484	PG442G07FE00011485
PG442G07FE00011486	PG442G07FE00011487	PG442G07FE00011488	PG442G07FE00011489
PG442G07FE00011490	PG442G07FE00011493	PG442G07FE00011495	PG442G07FE00011502
PG442G07FE00011503	PG442G07FE00011506	PG442G07FE00011509	PG442G07FE00011512
PG442G07FE00011513	PG442G07FE00011514	PG442G07FE00011515	PG442G07FE00011517
PG442G07FE00011518	PG442G07FE00011519	PG442G07FE00011520	PG442G07FE00011521
PG442G07FE00011522	PG442G07FE00011523	PG442G07FE00011524	PG442G07FE00011526
PG442G07FE00011529	PG442G07FE00011532	PG442G07FE00011535	PG442G07FE00011537
PG442G07FE00011538	PG442G07FE00011539	PG442G07FE00011540	PG442G07FE00011541
PG442G07FE00011545	PG442G07FE00011549	PG442G07FE00011552	PG442G07FE00011553
PG442G07FE00011554	PG442G07FE00011555	PG442G07FE00011556	PG442G07FE00011557
PG442G07FE00011558	PG442G07FE00011559	PG442G07FE00011560	PG442G07FE00011561
PG442G07FE00011562	PG442G07FE00011563	PG442G07FE00011564	PG442G07FE00011565
PG442G07FE00011566	PG442G07FE00011567	PG442G07FE00011568	PG442G07FE00011569
PG442G07FE00011570	PG442G07FE00011571	PG442G07FE00011572	PG442G07FE00011573
PG442G07FE00011574	PG442G07FE00011575	PG442G07FE00011576	PG442G07FE00011578
PG442G07FE00011579	PG442G07FE00011580	PG442G07FE00011581	PG442G07FE00011583
PG442G07FE00011585	PG442G07FE00011586	PG442G07FE00011588	PG442G07FE00011590
PG442G07FE00011592	PG442G07FE00011593	PG442G07FE00011594	PG442G07FE00011595
PG442G07FE00011596	PG442G07FE00011597	PG442G07FE00011599	PG442G07FE00011600
PG442G07FE00011601	PG442G07FE00011602	PG442G07FE00011605	PG442G07FE00011606

PG442G07FE00011607	PG442G07FE00011609	PG442G07FE00011611	PG442G07FE00011612
PG442G07FE00011613	PG442G07FE00011617	PG442G07FE00011619	PG442G07FE00011626
PG442G07FE00011638	PG442G07FE00011639	PG442G07FE00011645	PG442G07FE00011647
PG442G07FE00011650	PG442G07FE00011652	PG442G07FE00011654	PG442G07FE00011655
PG442G07FE00011656	PG442G07FE00011659	PG442G07FE00011661	PG442G07FE00011663
PG442G07FE00011665	PG442G07FE00011667	PG442G07FE00011668	PG442G07FE00011669
PG442G07FE00011670	PG442G07FE00011672	PG442G07FE00011673	PG442G07FE00011675
PG442G07FE00011677	PG442G07FE00011678	PG442G07FE00011679	PG442G07FE00011680
PG442G07FE00011681	PG442G07FE00011683	PG442G07FE00011684	PG442G07FE00011722
PG442G07FE00011732	PG442G07FE00011735	PG442G07FE00011737	PG442G07FE00011741
PG442G07FE00011742	PG442G07FE00011744	PG442G07FE00011746	PG442G07FE00011747
PG442G07FE00011748	PG442G07FE00011750	PG442G07FE00011753	PG442G07FE00011756
PG442G07FE00011757	PG442G07FE00011759	PG442G07FE00011760	PG442G07FE00011763
PG442G07FE00011764	PG442G07FE00011767	PG442G07FE00011768	PG442G07FE00011769
PG442G07FE00011775	PG442G07FE00011776	PG442G07FE00011779	PG442G07FE00011781
PG442G07FE00011782	PG442G07FE00011785	PG442G07FE00011792	PG442G07FE00011794
PG442G07FE00011795	PG442G07FE00011798	PG442G07FE00011799	PG442G07FE00011802
PG442G07FE00011805	PG442G07FE00011806	PG442G07FE00011809	PG442G07FE00011816
PG442G07FE00011818	PG442G07FE00011820	PG442G07FE00011821	PG442G07FE00011822
PG442G07FE00011823	PG442G07FE00011824	PG442G07FE00011826	PG442G07FE00011828
PG442G07FE00011829	PG442G07FE00011830	PG442G07FE00011831	PG442G07FE00011834
PG442G07FE00011835	PG442G07FE00011836	PG442G07FE00011837	PG442G07FE00011839
PG442G07FE00011841	PG442G07FE00011844	PG442G07FE00011847	PG442G07FE00011849
PG442G07FE00011851	PG442G07FE00011852	PG442G07FE00011854	PG442G07FE00011856
PG442G07FE00011858	PG442G07FE00011873	PG442G07FE00011874	PG442G07FE00011875
PG442G07FE00011876	PG442G07FE00011879	PG442G07FE00011881	PG442G07FE00011883
PG442G07FE00011886	PG442G07FE00011889	PG442G07FE00011891	PG442G07FE00011892
PG442G07FE00011893	PG442G07FE00011894	PG442G07FE00011895	PG442G07FE00011896
PG442G07FE00011898	PG442G07FE00011900	PG442G07FE00011902	PG442G07FE00011904
PG442G07FE00011906	PG442G07FE00011907	PG442G07FE00011909	PG442G07FE00011910
PG442G07FE00011911	PG442G07FE00011913	PG442G07FE00011916	PG442G07FE00011920
PG442G07FE00011921	PG442G07FE00011923	PG442G07FE00011929	PG442G07FE00011931
PG442G07FE00011946	PG442G07FE00011948	PG442G07FE00011951	PG442G07FE00011953
PG442G07FE00011955	PG442G07FE00011956	PG442G07FE00011958	PG442G07FE00011960
PG442G07FE00011961	PG442G07FE00011962	PG442G07FE00011963	PG442G07FE00011965
PG442G07FE00011966	PG442G07FE00011967	PG442G07FE00011968	PG442G07FE00011969
PG442G07FE00011970	PG442G07FE00011972	PG442G07FE00011973	PG442G07FE00011974

PG442G07FE00011977	PG442G07FE00011978	PG442G07FE00011981	PG442G07FE00011983
PG442G07FE00011986	PG442G07FE00011987	PG442G07FE00011988	PG442G07FE00011990
PG442G07FE00011991	PG442G07FE00011993	PG442G07FE00011994	PG442G07FE00011995
PG442G07FE00011997	PG442G07FE00011998	PG442G07FE00012000	PG442G07FE00012001
PG442G07FE00012002	PG442G07FE00012003	PG442G07FE00012005	PG442G07FE00012011
PG442G07FE00012012	PG442G07FE00012014	PG442G07FE00012018	PG442G07FE00012019
PG442G07FE00012025	PG442G07FE00012026	PG442G07FE00012027	PG442G07FE00012031
PG442G07FE00012036	PG442G07FE00012037	PG442G07FE00012038	PG442G07FE00012040
PG442G07FE00012041	PG442G07FE00012042	PG442G07FE00012043	PG442G07FE00012044
PG442G07FE00012045	PG442G07FE00012046	PG442G07FE00012047	PG442G07FE00012048
PG442G07FE00012049	PG442G07FE00012050	PG442G07FE00012052	PG442G07FE00012054
PG442G07FE00012055	PG442G07FE00012057	PG442G07FE00012059	PG442G07FE00012061
PG442G07FE00012064	PG442G07FE00012066	PG442G07FE00012069	PG442G07FE00012073
PG442G07FE00012074	PG442G07FE00012075	PG442G07FE00012076	PG442G07FE00012077
PG442G07FE00012079	PG442G07FE00012080	PG442G07FE00012081	PG442G07FE00012098
PG442G07FE00012100	PG442G07FE00012117	PG442G07FE00012118	PG442G07FE00012174
PG442G07FE00012180	PG442G07FE00012197	PG442G07FE00012198	PG442G07FE00012199
PG442G07FE00012200	PG442G07FE00012203	PG442G07FE00012204	PG442G07FE00012208
PG442G07FE00012216	PG442G07FE00012220	PG442G07FE00012222	PG442G07FE00012223
PG442G07FE00012226	PG442G07FE00012231	PG442G07FE00012233	PG442G07FE00012234
PG442G07FE00012236	PG442G07FE00012246	PG442G07FE00012249	PG442G07FE00012257
PG442G07FE00012260	PG442G07FE00012261	PG442G07FE00012263	PG442G07FE00012266
PG442G07FE00012268	PG442G07FE00012274	PG442G07FE00012280	PG442G07FE00012282
PG442G07FE00012285	PG442G07FE00012291	PG442G07FE00012293	PG442G07FE00012295
PG442G07FE00012296	PG442G07FE00012297	PG442G07FE00012298	PG442G07FE00012299
PG442G07FE00012306	PG442G07FE00012308	PG442G07FE00012310	PG442G07FE00012318
PG442G07FE00012328	PG442G07FE00012330	PG442G07FE00012331	PG442G07FE00012333
PG442G07FE00012335	PG442G07FE00012337	PG442G07FE00012339	PG442G07FE00012342
PG442G07FE00012344	PG442G07FE00012346	PG442G07FE00012347	PG442G07FE00012349
PG442G07FE00012350	PG442G07FE00012352	PG442G07FE00012357	PG442G07FE00012360
PG442G07FE00012361	PG442G07FE00012362	PG442G07FE00012363	PG442G07FE00012364
PG442G07FE00012366	PG442G07FE00012367	PG442G07FE00012368	PG442G07FE00012369
PG442G07FE00012371	PG442G07FE00012373	PG442G07FE00012374	PG442G07FE00012375
PG442G07FE00012378	PG442G07FE00012379	PG442G07FE00012381	PG442G07FE00012382
PG442G07FE00012384	PG442G07FE00012385	PG442G07FE00012386	PG442G07FE00012387
PG442G07FE00012388	PG442G07FE00012389	PG442G07FE00012390	PG442G07FE00012391
PG442G07FE00012392	PG442G07FE00012393	PG442G07FE00012394	PG442G07FE00012396

PG442G07FE00012397	PG442G07FE00012398	PG442G07FE00012399	PG442G07FE00012400
PG442G07FE00012401	PG442G07FE00012402	PG442G07FE00012403	PG442G07FE00012404
PG442G07FE00012405	PG442G07FE00012406	PG442G07FE00012407	PG442G07FE00012408
PG442G07FE00012409	PG442G07FE00012410	PG442G07FE00012411	PG442G07FE00012412
PG442G07FE00012413	PG442G07FE00012415	PG442G07FE00012416	PG442G07FE00012417
PG442G07FE00012418	PG442G07FE00012419	PG442G07FE00012420	PG442G07FE00012421
PG442G07FE00012422	PG442G07FE00012423	PG442G07FE00012424	PG442G07FE00012425
PG442G07FE00012426	PG442G07FE00012427	PG442G07FE00012428	PG442G07FE00012429
PG442G07FE00012430	PG442G07FE00012431	PG442G07FE00012432	PG442G07FE00012433
PG442G07FE00012434	PG442G07FE00012435	PG442G07FE00012437	PG442G07FE00012438
PG442G07FE00012439	PG442G07FE00012440	PG442G07FE00012441	PG442G07FE00012442
PG442G07FE00012443	PG442G07FE00012444	PG442G07FE00012445	PG442G07FE00012446
PG442G07FE00012447	PG442G07FE00012449	PG442G07FE00012451	PG442G07FE00012452
PG442G07FE00012454	PG442G07FE00012455	PG442G07FE00012461	PG442G07FE00012462
PG442G07FE00012463	PG442G07FE00012464	PG442G07FE00012465	PG442G07FE00012466
PG442G07FE00012467	PG442G07FE00012468	PG442G07FE00012469	PG442G07FE00012470
PG442G07FE00012471	PG442G07FE00012472	PG442G07FE00012475	PG442G07FE00012476
PG442G07FE00012480	PG442G07FE00012484	PG442G07FE00012485	PG442G07FE00012486
PG442G07FE00012487	PG442G07FE00012488	PG442G07FE00012489	PG442G07FE00012490
PG442G07FE00012491	PG442G07FE00012492	PG442G07FE00012493	PG442G07FE00012494
PG442G07FE00012495	PG442G07FE00012497	PG442G07FE00012498	PG442G07FE00012499
PG442G07FE00012500	PG442G07FE00012502	PG442G07FE00012503	PG442G07FE00012504
PG442G07FE00012505	PG442G07FE00012506	PG442G07FE00012507	PG442G07FE00012508
PG442G07FE00012509	PG442G07FE00012510	PG442G07FE00012511	PG442G07FE00012513
PG442G07FE00012514	PG442G07FE00012515	PG442G07FE00012516	PG442G07FE00012517
PG442G07FE00012518	PG442G07FE00012519	PG442G07FE00012520	PG442G07FE00012521
PG442G07FE00012522	PG442G07FE00012523	PG442G07FE00012524	PG442G07FE00012525
PG442G07FE00012527	PG442G07FE00012528	PG442G07FE00012529	PG442G07FE00012530
PG442G07FE00012531	PG442G07FE00012532	PG442G07FE00012533	PG442G07FE00012535
PG442G07FE00012537	PG442G07FE00012539	PG442G07FE00012540	PG442G07FE00012541
PG442G07FE00012542	PG442G07FE00012543	PG442G07FE00012544	PG442G07FE00012545
PG442G07FE00012546	PG442G07FE00012547	PG442G07FE00012548	PG442G07FE00012549
PG442G07FE00012550	PG442G07FE00012551	PG442G07FE00012552	PG442G07FE00012553
PG442G07FE00012554	PG442G07FE00012555	PG442G07FE00012556	PG442G07FE00012557
PG442G07FE00012558	PG442G07FE00012559	PG442G07FE00012560	PG442G07FE00012561
PG442G07FE00012562	PG442G07FE00012563	PG442G07FE00012564	PG442G07FE00012565
PG442G07FE00012566	PG442G07FE00012567	PG442G07FE00012568	PG442G07FE00012569

PG442G07FE00012572	PG442G07FE00012573	PG442G07FE00012574	PG442G07FE00012575
PG442G07FE00012576	PG442G07FE00012577	PG442G07FE00012578	PG442G07FE00012579
PG442G07FE00012584	PG442G07FE00012586	PG442G07FE00012592	PG442G07FE00012593
PG442G07FE00012594	PG442G07FE00012595	PG442G07FE00012596	PG442G07FE00012597
PG442G07FE00012598	PG442G07FE00012599	PG442G07FE00012600	PG442G07FE00012601
PG442G07FE00012602	PG442G07FE00012603	PG442G07FE00012607	PG442G07FE00012610
PG442G07FE00012611	PG442G07FE00012613	PG442G07FE00012615	PG442G07FE00012618
PG442G07FE00012619	PG442G07FE00012621	PG442G07FE00012622	PG442G07FE00012623
PG442G07FE00012624	PG442G07FE00012625	PG442G07FE00012626	PG442G07FE00012627
PG442G07FE00012628	PG442G07FE00012629	PG442G07FE00012630	PG442G07FE00012632
PG442G07FE00012633	PG442G07FE00012634	PG442G07FE00012635	PG442G07FE00012636
PG442G07FE00012637	PG442G07FE00012638	PG442G07FE00012640	PG442G07FE00012641
PG442G07FE00012642	PG442G07FE00012645	PG442G07FE00012649	PG442G07FE00012652
PG442G07FE00012654	PG442G07FE00012655	PG442G07FE00012657	PG442G07FE00012659
PG442G07FE00012660	PG442G07FE00012661	PG442G07FE00012662	PG442G07FE00012663
PG442G07FE00012665	PG442G07FE00012672	PG442G07FE00012673	PG442G07FE00012683
PG442G07FE00012694	PG442G07FE00012698	PG442G07FE00012701	PG442G07FE00012708
PG442G07FE00012710	PG442G07FE00012715	PG442G07FE00012721	PG442G07FE00012724
PG442G07FE00012728	PG442G07FE00012729	PG442G07FE00012732	PG442G07FE00012733
PG442G07FE00012734	PG442G07FE00012737	PG442G07FE00012738	PG442G07FE00012740
PG442G07FE00012742	PG442G07FE00012744	PG442G07FE00012746	PG442G07FE00012748
PG442G07FE00012755	PG442G07FE00012761	PG442G07FE00012765	PG442G07FE00012768
PG442G07FE00012769	PG442G07FE00012770	PG442G07FE00012775	PG442G07FE00012783
PG442G07FE00012788	PG442G07FE00012789	PG442G07FE00012790	PG442G07FE00012791
PG442G07FE00012792	PG442G07FE00012793	PG442G07FE00012794	PG442G07FE00012795
PG442G07FE00012796	PG442G07FE00012798	PG442G07FE00012800	PG442G07FE00012801
PG442G07FE00012802	PG442G07FE00012805	PG442G07FE00012813	PG442G07FE00012815
PG442G07FE00012817	PG442G07FE00012819	PG442G07FE00012820	PG442G07FE00012827
PG442G07FE00012828	PG442G07FE00012830	PG442G07FE00012836	PG442G07FE00012840
PG442G07FE00012842	PG442G07FE00012843	PG442G07FE00012844	PG442G07FE00012846
PG442G07FE00012847	PG442G07FE00012848	PG442G07FE00012849	PG442G07FE00012850
PG442G07FE00012852	PG442G07FE00012853	PG442G07FE00012856	PG442G07FE00012860
PG442G07FE00012866	PG442G07FE00012869	PG442G07FE00012872	PG442G07FE00012873
PG442G07FE00012874	PG442G07FE00012875	PG442G07FE00012877	PG442G07FE00012880
PG442G07FE00012881	PG442G07FE00012890	PG442G07FE00012894	PG442G07FE00012895
PG442G07FE00012900	PG442G07FE00012912	PG442G07FE00012914	PG442G07FE00012916
PG442G07FE00012917	PG442G07FE00012933	PG442G07FE00012935	PG442G07FE00012938

PG442G07FE00012939	PG442G07FE00012941	PG442G07FE00012951	PG442G07FE00012954
PG442G07FE00012974	PG442G07FE00012980	PG442G07FE00012982	PG442G07FE00012983
PG442G07FE00012986	PG442G07FE00012989	PG442G07FE00012993	PG442G07FE00013000
PG442G07FE00013003	PG442G07FE00013032	PG442G07FE00013035	PG442G07FE00013036
PG442G07FE00013037	PG442G07FE00013038	PG442G07FE00013039	PG442G07FE00013044
PG442G07FE00013045	PG442G07FE00013050	PG442G07FE00013068	PG442G07FE00013350
PG442G07FE00013351	PG442G07FE00013352	PG442G07FE00013353	PG442G07FE00013356
PG442G07FE00013363	PG442G07FE00013371	PG442G07FE00013380	PG442G07FE00013384
PG442G07FE00013386	PG442G07FE00013388	PG442G07FE00013389	PG442G07FE00013397
PG442G07FE00013399	PG442G07FE00013401	PG442G07FE00013406	PG442G07FE00013407
PG442G07FE00013408	PG442G07FE00013409	PG442G07FE00013663	PG442G07FE00013753
PG442G07FE00013757	PG442G07FE00013793	PG442G07FE00013827	PG442G07FE00013832
PG442G07FE00013838	PG442G07FE00013842	PG442G07FE00013846	PG442G07FE00013856
PG442G07FE00013857	PG442G07FE00013874	PG442G07FE00013879	PG442G07FE00013910
PG442G07FE00013915	PG442G07FE00013918	PG442G07FE00013924	PG442G07FE00013928
PG442G07FE00013929	PG442G07FE00013931	PG442G07FE00013943	PG442G07FE00013946
PG442G07FE00013949	PG442G07FE00013951	PG442G07FE00013952	PG442G07FE00013953
PG442G07FE00013960	PG442G07FE00013961	PG442G07FE00013967	PG442G07FE00013970
PG442G07FE00013975	PG442G07FE00013978	PG442G07FE00013981	PG442G07FE00014005
PG442G07FE00014011	PG442G07FE00014013	PG442G07FE00014022	PG442G07FE00014026
PG442G07FE00014144	PG442G07FE00014153	PG442G07FE00014154	PG442G07FE00014155
PG442G07FE00014156	PG442G07FE00014157	PG442G07FE00014167	PG442G07FE00014168
PG442G07FE00014169	PG442G07FE00014170	PG442G07FE00014176	PG442G07FE00014182
PG442G07FE00014183	PG442G07FE00014186	PG442G07FE00014188	PG442G07FE00014189
PG442G07FE00014227	PG442G07FE00014316	PG442G07FE00014377	PG442G07FE00014614
PG442G07FE00014775	PG442G07FE00014788	PG442G07FE00014817	PG442G07FE00014819
PG442G07FE00014822	PG442G07FE00014823	PG442G07FE00014824	PG442G07FE00014825
PG442G07FE00014827	PG442G07FE00014829	PG442G07FE00014834	PG442G07FE00014836
PG442G07FE00014837	PG442G07FE00014838	PG442G07FE00014841	PG442G07FE00014845
PG442G07FE00014863	PG442G07FE00014869	PG442G07FE00014873	PG442G07FE00014876
PG442G07FE00014877	PG442G07FE00014879	PG442G07FE00014934	PG442G07FE00015025
PG442G07FE00015058	PG442G07FE00015060	PG442G07FE00015153	PG442G07FE00015157
PG442G07FE00015158	PG442G07FE00015164	PG442G07FE00015189	PG442G07FE00015191
PG442G07FE00015195	PG442G07FE00015199	PG442G07FE00015201	PG442G07FE00015206
PG442G07FE00015207	PG442G07FE00015208	PG442G07FE00015213	PG442G07FE00015214
PG442G07FE00015215	PG442G07FE00015223	PG442G07FE00015225	PG442G07FE00015226
PG442G07FE00015227	PG442G07FE00015228	PG442G07FE00015234	PG442G07FE00015245

PG442G07FE00015257	PG442G07FE00015259	PG442G07FE00015362	PG442G07FE00015368
PG442G07FE00015369	PG442G07FE00015379	PG442G07FE00015380	PG442G07FE00015381
PG442G07FE00015383	PG442G07FE00015385	PG442G07FE00015386	PG442G07FE00015387
PG442G07FE00015389	PG442G07FE00015390	PG442G07FE00015391	PG442G07FE00015395
PG442G07FE00015397	PG442G07FE00015400	PG442G07FE00015401	PG442G07FE00015402
PG442G07FE00015403	PG442G07FE00015404	PG442G07FE00015405	PG442G07FE00015406
PG442G07FE00015407	PG442G07FE00015408	PG442G07FE00015409	PG442G07FE00015411
PG442G07FE00015413	PG442G07FE00015414	PG442G07FE00015416	PG442G07FE00015417
PG442G07FE00015425	PG442G07FE00015431	PG442G07FE00015432	PG442G07FE00015434
PG442G07FE00015439	PG442G07FE00015450	PG442G07FE00015451	PG442G07FE00015552
PG442G07FE00015596	PG442G07FE00015611	PG442G07FE00015618	PG442G07FE00015622
PG442G07FE00015623	PG442G07FE00015639	PG442G07FE00015643	PG442G07FE00015644
PG442G07FE00015645	PG442G07FE00015646	PG442G07FE00015647	PG442G07FE00015648
PG442G07FE00015649	PG442G07FE00015650	PG442G07FE00015652	PG442G07FE00015653
PG442G07FE00015654	PG442G07FE00015655	PG442G07FE00015666	PG442G07FE00015668
PG442G07FE00015669	PG442G07FE00015672	PG442G07FE00015673	PG442G07FE00015674
PG442G07FE00015675	PG442G07FE00015680	PG442G07FE00015682	PG442G07FE00015683
PG442G07FE00015698	PG442G07FE00015700	PG442G07FE00015701	PG442G07FE00015702
PG442G07FE00015705	PG442G07FE00015706	PG442G07FE00015707	PG442G07FE00015708
PG442G07FE00015709	PG442G07FE00015710	PG442G07FE00015711	PG442G07FE00015713
PG443G07FE00000416	PG443G07FE00000445	PG443G07FE00000751	PG443G07FE00000752
PG443G07FE00000757	PG443G07FE00000760	PG443G07FE00000761	PG443G07FE00000764
PG443G07FE00000765	PG443G07FE00000772	PG443G07FE00000780	PG443G07FE00000796